



CardioPart 12 Blue

12-Kanal-EKG

Gebrauchsanweisung

06/2020, Ausgabe 19



CardioPart 12 Blue erfüllt die Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte sowie die Bestimmungen des Gesetzes über Medizinprodukte.



AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH unterhält ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 13485 und ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach MDD 93/42/EWG, Anhang II.

Diese Gebrauchsanweisung ist für die Software Version gültig, die auf der beiliegenden CD ausgewiesen ist.

Inhalt

Beschreibung	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Indikation.....	6
Kontraindikation	6
Sicherheitsbestimmungen	7
Sicherheitssymbol	7
Gebrauchsanweisung	7
Verantwortung des Betreibers.....	7
Einschränkungen und Ausschlüsse	7
Zubehör.....	7
Elektrische Sicherheit.....	8
Patientenkabel	9
Elektroden	9
Defibrillation	9
Umgebungsbedingungen	9
Beeinflussung durch elektromagnetische Strahlung	10
Beeinflussung durch andere Geräte.....	11
Beschädigung	11
Reparatur	11
Reinigung und Desinfektion	12
Sicherheitstechnische Kontrollen.....	13
Zeitintervall.....	13
EKG-Gerät CardioPart 12 Blue	13
System	13
Funktionsprüfung	14
Service	14
Servicenummer	14
Aufbau und Bedienelemente	15
Inbetriebnahme	16
Anschließen der Geräte	16
Allgemeine Einstellungen.....	18
Einstellungen für die Ergometrie	20
Programmstart	22
Start	22
Als Benutzer anmelden	22
Als anderer Benutzer anmelden.....	23
Kennwort ändern.....	23
Startoptionen.....	23
Patientendaten	24
EKG-Erfassung	25
Sofort-EKG aufzeichnen.....	25
Standard Ruhe-EKG aufzeichnen	27
Belastungs-EKG aufzeichnen	29
Gespeicherte Aufnahmen öffnen.....	32
Typschild und Symbole	33
Technische Daten	34
Optionales Zubehör.....	35
Fehlersuche und -behebung.....	36
Fehler bei der EKG-Aufzeichnung.....	36
Allgemeine Fehler	36

Leitlinie und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Störfestigkeit des CardioPart 12 Blue	37
Garantie	39
Entsorgung.....	40

Beschreibung



Das **CardioPart 12 Blue** ist ein Gerät zur Erfassung, Diagnose und Speicherung des 12-kanaligen EKGs.

Zum Gerät gehört die Anwendersoftware **AMEDTEC ECGpro**.

Das Gerät wurde nach dem aktuellen Stand der Technik entwickelt und erfüllt alle zutreffenden Anforderungen und Normen. Es gehört zur Risikoklasse IIa gemäß MDD, Anhang IX.

Das **CardioPart 12 Blue** ist mit einem PC verbunden, auf dem die Anwendersoftware AMEDTEC ECGpro installiert ist.

Das Gerät wandelt die EKG-Signale, die über Elektroden aufgenommen werden, in digitale Signale um und leitet das digitalisierte EKG drahtlos über Bluetooth an die Anwendersoftware weiter.

Die Anwendersoftware steuert das Gerät und stellt das EKG während der Erfassung auf dem Monitor dar. Außerdem steuert die Anwendersoftware weitere Geräte, wie Fahrradergometer und Blutdruckmessgeräte. Nach dem Ende der Erfassung wird die Aufnahme gespeichert. Danach kann die Aufnahme betrachtet, editiert und gedruckt werden. Optional werden die Aufnahmen zur weiteren Verwendung ins Klinik- oder Praxisnetzwerk übertragen. Informationen vom Krankenhausinformationssystem und der Praxissoftware werden eingelesen und verarbeitet.

Alle Funktionen und deren Bedienung sind in der Gebrauchsanweisung **AMEDTEC ECGpro CardioPart 12** beschrieben.

Die Anwendersoftware arbeitet lokal oder im Netzwerk.

Die Anwendersoftware wurde für das Betriebssystem Windows entwickelt und läuft auf PCs mit Intel- oder intelkompatiblem Prozessor. Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie in der **AMEDTEC ECGpro Installationsanleitung** im Abschnitt **Hardware und Software Anforderungen**.

Das **CardioPart 12 Blue** ist mit den folgenden Optionen erhältlich:

- *m* Ruhe-EKG mit automatischer EKG-Vermessung
- *mr* Ruhe-EKG mit automatischer EKG-Vermessung und Rhythmus-EKG
- *i* Ruhe-EKG mit automatischer EKG-Vermessung, EKG-Interpretation und Rhythmus-EKG
- *s* Ruhe- und Belastungs-EKG mit automatischer EKG-Vermessung, EKG-Interpretation, Rhythmus-EKG, ST-Vermessung und Steuerung von Ergometern und Blutdruckmessgeräten
- *as* Ruhe- und Belastungs-EKG mit automatischer EKG-Vermessung, EKG-Interpretation, Rhythmus-EKG, Online-Arrhythmie Detektion, ST-Vermessung und Steuerung von Ergometern und Blutdruckmessgeräten

Die folgenden Geräte der **P-Serie** sind für den **Einsatz in Arztpraxen** konzipiert. Aufnahmen, die mit diesen Geräten erfasst wurden, können **nicht über die DICOM- und HL7-Schnittstellen** exportiert werden. Fall- oder Anforderungsnummern können mit Aufnahmen dieser Geräte nicht abgearbeitet werden.

- *Pmr* Ruhe-EKG für Arztpraxen mit automatischer EKG-Vermessung und Rhythmus-EKG
- *Pi* Ruhe-EKG für Arztpraxen mit automatischer EKG-Vermessung, EKG-Interpretation und Rhythmus-EKG
- *Ps* Ruhe- und Belastungs-EKG für Arztpraxen mit automatischer EKG-Vermessung, EKG-Interpretation, Rhythmus-EKG, ST-Vermessung und Steuerung von Ergometern und Blutdruckmessgeräten
- *Pmrs* Ruhe- und Belastungs-EKG für Arztpraxen mit automatischer EKG-Vermessung, Rhythmus-EKG, ST-Vermessung und Steuerung von Ergometern und Blutdruckmessgeräten

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das **CardioPart 12 Blue** und die Anwendersoftware AMEDTEC *ECGpro* sind für das Erfassen, Analysieren und Speichern des 12-kanaligen Ruhe- und Belastungs-EKGs bestimmt.

Es kann bei Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern, Kleinkindern und Neugeborenen aller ethnischen Gruppen angewendet werden.

Das **CardioPart 12 Blue** ist für die Verwendung in Kliniken, Krankenhäusern, Medizinischen Versorgungszentren und Arztpraxen bestimmt.

Das Gerät ist nur auf ärztliche Anordnung am Patienten zu betreiben. Die Applikation der Elektroden sowie die Bedienung des Gerätes und der Anwendersoftware dürfen nur von geschultem und eingewiesenem medizinischem Fachpersonal vorgenommen werden.

Mit Ausnahme der Elektroden ist das **CardioPart 12 Blue** nicht für den direkten Kontakt zur Haut des Patienten bestimmt.

Indikation

Das Ruhe-EKG wird für die Abklärung folgender Symptome verwendet:

- Erkrankungen des kardiovaskulären Systems
- Myokardischämien
- Myokardinfarkt bei Patienten mit Brustschmerz
- Herzhypertrophie
- Herzrhythmusstörungen
- Störungen der Elektrophysiologie des Herzens
- Störungen der Schrittmacher- und Reizleitungssysteme

Das Ruhe-EKG kann auch für das Screening kardialer Auffälligkeiten und für die Beurteilung von Schrittmacherfunktionen verwendet werden.

Das Belastungs-EKG wird durchgeführt:

- zur Abklärung thorakaler Schmerzen
- zur Erfassung der körperlichen Belastbarkeit
- bei Patienten mit kardialen Risikofaktoren
- zur Beurteilung von Restischämien
 - nach Myokardinfarkt,
 - nach Revaskularisation durch interventionelle Techniken oder
 - nach aortokoronarer Bypassoperation

Kontraindikation

Kontraindikationen gelten nur für das Belastungs-EKG:

- Akutes Koronarsyndrom
- Symptomatische hochgradige Aortenklappenstenose
- Dekompensierte Herzinsuffizienz
- Akute Lungenembolie
- Akute entzündliche Herzerkrankungen
- Akute Aortendissektion
- Blutdruckkrise in Ruhe >180/100 mmHg
- Akute Beinvenenthrombose
- Akute schwere Allgemeinerkrankung
- Extrakardiale Erkrankungen mit deutlich limitierter Lebenserwartung (≤ 6 Monate)

Sicherheitsbestimmungen

Sicherheitssymbol



Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise, die unbedingt zu befolgen sind.

Gebrauchsanweisung



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig

- Bedienen Sie das **CardioPart 12 Blue** wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Halten Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit.
- Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitsinformationen.
- Diese Gebrauchsanweisung steht Ihnen in der Software AMEDTEC *ECGpro* im Menü *Hilfe* ► *Dokumente* auch elektronisch zur Verfügung.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Bedienung an Ihren Fachhändler oder an unseren Service.

Verantwortung des Betreibers



Der Betreiber trägt die Verantwortung für den sicheren Betrieb des **CardioPart 12 Blue** und der damit verbundenen Geräte. Er hat folgendes sicherzustellen:

- Das **CardioPart 12 Blue** und die Anwendersoftware dürfen nur von geschultem medizinischem Personal auf Weisung eines qualifizierten Arztes verwendet werden.
- Die Schulung des Personals soll durch einen Medizinprodukteberater erfolgen. Die Teilnahme an der Schulung ist zu dokumentieren.
- Diese Gebrauchsanweisung ist so aufzubewahren, dass sie für den Benutzer jederzeit zugänglich ist.
- Das Gerät muss sich in einem einwandfreien technischen Zustand befinden. Defekte Teile und Leitungen sind umgehend auszutauschen.
- Bei der Zusammenschaltung des **CardioPart 12 Blue** mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Geräten entsteht ein Medizinisches Elektrisches System, dessen Sicherheit gewährleistet sein muss. Medizinische Elektrische Systeme sind einer Bewertung nach der Norm EN 60601-1 zu unterziehen.
- Die Intervalle für die Durchführung von Sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) sind vom Betreiber festzulegen. AMEDTEC empfiehlt, das Gerät aller 2 Jahre einer Wartung und STK zu unterziehen.
- Wenden Sie sich bei allen Fragen zur Sicherheit an Ihren Fachhändler oder an unseren Service.

Einschränkungen und Ausschlüsse



Das **CardioPart 12 Blue** ist nicht für Anwendungen mit direktem Kontakt zum Herzen zugelassen.



Das Gerät darf am Patienten nicht gleichzeitig mit HF-Chirurgiegeräten verwendet werden.



Das Gerät darf nicht in einem MRT-Labor aufgestellt werden.



Das Gerät ist kein steriles Produkt und daher für die Verwendung in einer sterilen Umgebung nicht geeignet.

Zubehör



Verwenden Sie nur Zubehör, das in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführt ist. Die CE-Konformität gilt nur bei Verwendung dieses Zubehörs.

Die Verwendung von anderen Patientenkabeln, Adaptern und Leitungen kann eine fehlerhafte Funktion des Gerätes, eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit sowie eine erhöhte Elektromagnetische Störaussendung zur Folge haben.

Elektrische Sicherheit

Das **CardioPart 12 Blue** ist ein Medizinisches Elektrisches Gerät. Es entspricht allen Anforderungen an die Sicherheit Medizinischer elektrischer Geräte, insbesondere den Anforderungen nach DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2 sowie DIN EN 60601-2-25.

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wird das EKG-Gerät über Bluetooth an einem PC betrieben.

Der PC sowie alle anderen Geräte der Kommunikationstechnik wie Monitore und Drucker sind in der Regel **Nichtmedizinische elektrische Geräte**. Diese Geräte erfüllen nicht die Anforderungen, die die einschlägigen Normen an die Sicherheit **Medizinischer elektrischer Geräte** stellen. Das betrifft insbesondere die elektrischen Parameter. Es sind deshalb besondere Maßnahmen zu ergreifen, um den Patienten vor Gefährdungen durch elektrischen Strom, die von Nichtmedizinischen elektrischen Geräten ausgehen können, zu schützen.

Den wichtigsten Beitrag zum Schutz des Patienten übernimmt hierbei das Anwendungsteil vom Typ CF. Die Isolation hält einer Spannung von 4000 Volt stand und schützt den Patienten davor, dass über die Elektroden Ströme in den Körper gelangen können.

Vom PC sowie den anderen Geräten der Kommunikationstechnik können weitere Gefährdungen ausgehen.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

1. Stellen Sie **Nichtmedizinische Elektrische Geräte (PC, Drucker, Monitor)** so auf, dass der Abstand zwischen diesen Geräten und dem Patienten **mindestens 1,5 Meter** beträgt. Dieser Mindestabstand soll verhindern, dass der Patient Nichtmedizinische Elektrische Geräte direkt oder indirekt berühren kann. Ein indirektes Berühren von metallischen Teilen Nichtmedizinischer elektrischer Geräte liegt auch dann vor, wenn eine Person gleichzeitig den Patienten und diese Teile berührt.



Wenn der vorstehend beschriebene Abstand von mindestens 1,5 Meter nicht gewährleistet ist, sind Nichtmedizinische Elektrische Geräte über einen Sicherheitstrenntrafo zu betreiben. Dieser Sicherheitstrenntrafo muss der Norm DIN EN 61558-2-4 entsprechen. Dies gilt auch dann, wenn als PC ein Notebook oder Laptop mit angeschlossenen Geräten im Batteriebetrieb verwendet wird.

- ☞ Stecken Sie die Geräte entweder direkt am Sicherheitstrenntrafo an oder verwenden Sie eine Verteilerleiste, die mit dem Sicherheitstrenntrafo entweder fest oder über einen speziellen Stecker verbunden ist. Dieser Stecker muss so ausgeführt sein, dass er nicht in die Netzsteckdose gesteckt werden kann. Für den Anschluss der Geräte sind ebenfalls Netzkabel zu verwenden, die nicht in die Netzsteckdose gesteckt werden können. Die speziellen Stecker sollen verhindern, dass die Geräte direkt ans Versorgungsnetz angesteckt werden und damit der Sicherheitstrenntrafo umgangen wird.
- ☞ Legen Sie die Verteilerleiste nicht auf den Fußboden.
- ☞ Überschreiten Sie nicht die Stromstärke, für die die Verteilerleiste zugelassen ist.



Betreiben Sie am Sicherheitstrenntrafo nur Geräte, die zum System gehören. Achten Sie besonders darauf, dass Geräte, die am Sicherheitstrenntrafo angeschlossen sind, nur über galvanisch getrennte Signalleitungen mit Nichtmedizinischen elektrischen Geräten außerhalb des Systems verbunden sind.

Achtung: Kabel eines Computernetzwerkes sind typische elektrisch leitende Verbindungen, die vom System nach außerhalb führen. Verwenden Sie für die Anbindung an ein Netzwerk den Medical Isolator MI 1005 Art. Nr. 001 831.

2. Alle Geräte eines Systems müssen am selben Stromkreis angeschlossen sein. Geräte, die nicht am selben Stromkreis angeschlossen sind, müssen galvanisch getrennt betrieben werden.
3. Verwenden Sie nur Nichtmedizinische elektrische Geräte mit CE-Kennzeichnung. Nur so können Sie sicher sein, dass diese Geräte den einschlägigen Normen entsprechen.
4. Schließen Sie das Patienten-kabel oder die Saugelektrodenanlage ausschließlich am EKG-Gerät und niemals an irgendeinem anderen Gerät an.
5. Wenn nicht alle 10 Elektroden verwendet werden (z.B. nur R, L, F, N), legen Sie die nichtverwendeten Elektroden (im Beispiel C1 bis C6) so ab, dass diese nicht in Kontakt mit metallischen Teilen kommen können. Berühren Sie keine nichtangelegten Elektroden.
6. Verwenden Sie nur von AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH geliefertes Zubehör.
7. Betreiben Sie das **CardioPart 12 Blue** nur mit ordnungsgemäß geschlossenem Batteriefach.
8. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach zum Schutz vor Beschädigungen und möglichen Beeinträchtigungen der Sicherheit durch Auslaufen der Batterien.
9. Während der Durchführung von Service- und Wartungsarbeiten, die die elektrische Sicherheit beeinträchtigen könnten, darf die Anlage nicht benutzt werden.

Patientenkabel

Verwenden Sie ausschließlich Patientenkabel, die mit **AMEDTEC** gekennzeichnet sind (siehe **Optionales Zubehör** auf Seite 35) und beachten Sie die beigefügte Gebrauchsanweisung.



Schrauben Sie das Patientenkabel fest am Gerät an

- Wenn das Patientenkabel über die Elektroden mit dem Körper des Patienten verbunden ist, muss es aus Sicherheitsgründen fest am Gerät angeschlossen sein.
- Trennen Sie das Patientenkabel nur zur Desinfektion und im Servicefall vom Gerät. Schließen Sie es danach wieder an bevor Sie die Patientenumgebung betreten.
- Prinzipiell ist die Reihenfolge wie folgt:
 1. Schließen Sie das Patientenkabel immer zuerst am Gerät an.
 2. Verbinden Sie erst danach das Patientenkabel über die Elektroden mit dem Patienten.
 3. Trennen Sie nach der EKG-Erfassung zuerst den Patienten vom Patientenkabel.
 4. Ziehen Sie, falls erforderlich, das Patientenkabel erst danach vom Gerät ab

Wenn Sie anstelle des Patientenkabels eine Saugelektrodenanlage verwenden, so schließen Sie diese unter Verwendung des **EKG-Adapters**, Art.-Nr. 011.0270, an. Verwenden Sie nur Saugelektrodenanlagen, die von AMEDTEC geliefert oder deren Verwendbarkeit von AMEDTEC bestätigt worden ist.

Elektroden

Verwenden Sie Elektroden mit CE-Kennzeichnung.
Achten Sie auf ausgewiesene Biokompatibilität. Andernfalls können bei Patienten allergische Reaktionen auftreten.

Defibrillation

Das Gerät ist nur bei Verwendung eines Patientenkabels mit der Kennzeichnung AMEDTEC gegen Defibrillation geschützt (siehe **Optionales Zubehör** auf Seite 35). Diese Patientenkabel enthalten Bauteile, die den vom Defibrillator abgegebenen Strom begrenzen.



Die Patientenkabel sind auf dem Stecker mit dem Symbol für das defibrillationsgeschützte Anwendungsteil vom Typ CF gekennzeichnet.



Die Verwendung eines anderen Patientenkabels kann zur Zerstörung des EKG-Gerätes und zur Reduzierung der abgegebenen Defibrillatorleistung führen.

Dadurch kann die Wirksamkeit des Defibrillatorimpulses herabgesetzt werden.

Fragen Sie Ihren Fachhändler, wenn Sie eine Saugelektrodenanlage anschließen wollen oder wenden Sie sich direkt an unseren Service.

Umgebungsbedingungen

Das EKG-Gerät und die damit verbundenen Geräte der Informationstechnik (PC, Monitor, Drucker...) dürfen nicht in einer explosionsgefährdeten oder mit Sauerstoff angereicherten Umgebung und nicht in Räumen mit entzündbaren Gasen, wie Anästhetika, verwendet werden.

Das EKG-Gerät ist nicht spritzwassergeschützt. Vermeiden Sie deshalb jede Berührung mit Flüssigkeiten und verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb geschlossener Räume. Das EKG-Gerät besitzt die Schutzart IP 20.

Bei starkem Temperaturwechsel kann sich im Innern des Gerätes Feuchtigkeit bilden. Das ist dann der Fall, wenn das Gerät aus einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht wird. Nehmen Sie das Gerät erst dann in Betrieb, wenn Sie sich sicher sind, dass die Feuchtigkeit abgetrocknet ist.



Wenn Flüssigkeit in das Innere des Gerätes eingedrungen ist, muss der Patient unverzüglich vom Gerät getrennt werden. Danach ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

Das Geräteinnere ist zu trocknen und wenn notwendig zu reinigen und zu desinfizieren. Nach dem Schließen des Gerätes sind eine Funktionsprüfung und eine sicherheitstechnische Prüfung durchzuführen.

Für eine fachgerechte Ausführung dieser Arbeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Service.

Das Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 40°C verwendet werden. Bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches kann es zur ungenauen Wiedergabe des EKGs kommen.

Achten sie darauf, dass das Bedienpersonal keinen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist, unter denen elektrostatische Ladungen entstehen können. Die Luftfeuchte soll > 25 % betragen. Tragen Sie keine synthetische Kleidung und meiden Sie ungeeignete Bodenbeläge (Teppichböden).



Elektrostatische Entladungen können durch Berührung des Gerätes hervorgerufen werden und zu Funktionsstörungen führen.

In extremen Fällen können elektrostatische Entladungen dazu führen, dass die Erfassung des EKGs kurzzeitig aussetzt. In diesem Fall ist die Bluetooth-Verbindung zum PC unterbrochen und die orangefarbene Anzeige erlischt.

- ☞ Sollte die Darstellung des EKGs nicht innerhalb von 15 Sekunden fortgesetzt werden, so schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.


Beeinflussung durch elektromagnetische Strahlung



Elektrische oder magnetische Felder können Störungen verursachen und die EKG-Aufzeichnung beeinflussen.

Das EKG-Gerät darf nur in der unter Abschnitt Leitlinie und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Störfestigkeit des CardioPart 12 Blue angegebenen elektromagnetischen Umgebung verwendet werden

Sichtbare Störung im EKG

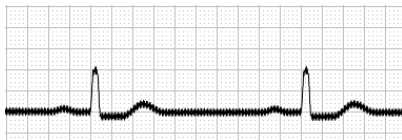

Mögliche Ursache

Elektromagnetische Strahlung kann durch Elektromedizinische Geräte, Funkgeräte, Geräte der Kommunikation- und Bürotechnik sowie durch elektrische Installationen hervorgerufen werden.

Elektromagnetische Strahlung führt durch Überlagerung von Störfrequenzen zu einer breiten EKG-Kurve.

Niederfrequente Störungen wie Netzbrummen sind bei ausgeschaltetem Netzfilter deutlich erkennbar.

Maßnahme

Untersuchen Sie den Standort auf Geräte, die Elektromagnetische Strahlungen aussenden können. Schalten Sie solche Geräte aus, um eine Veränderung feststellen zu können.

Verändern Sie den Standort und die Richtung der Liege oder des Ergometers bzw. Laufbandes.

Hohe Impedanzen zwischen Haut und Elektrode können die Empfindlichkeit des Gerätes gegenüber elektromagnetischen Störungen erhöhen. Achten Sie deshalb auf eine sorgfältige Applikation der Elektroden.



Ist die Option **Erkannte Schrittmacher durch künstlichen 1 mV-Impuls verdeutlichen** eingeschaltet, wird die Position des Schrittmacherspikes ins EKG eingblendet.

Elektromagnetische Störungen können dazu führen, dass Impulse dargestellt werden, obwohl keine Schrittmacherspikes vorhanden sind.

Schalten Sie die Option aus.

Hohe Impedanzen zwischen Haut und Elektrode können die Empfindlichkeit des Gerätes gegenüber elektromagnetischen Störungen erhöhen. Achten Sie deshalb auf eine sorgfältige Applikation der Elektroden.

Überprüfen Sie das Patienten-kabel.

Hohe Impedanzen zwischen Haut und Elektrode können die Empfindlichkeit des Gerätes gegenüber elektromagnetischen Störungen erhöhen. Achten Sie deshalb auf eine sorgfältige Applikation der Elektroden.

Beeinflussung durch andere Geräte



Bei gleichzeitiger Anwendung eines weiteren Gerätes, das ebenfalls durch Elektroden mit dem Patienten elektrisch verbunden ist, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Achten Sie deshalb bei Anschluss eines weiteren Gerätes darauf, ob sich Veränderungen in der EKG-Darstellung ergeben.



Die Verwendung des Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in einer solchen räumlichen Anordnung dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich von der ordnungsgemäßen Funktion zu überzeugen.



Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (Funkgeräte) einschließlich deren Zubehör wie z.B. Antennenkabel und externe Antennen sollten nicht in einem geringeren Abstand als 30 cm zu den Teilen und Leitungen des Geräts verwendet werden. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale führen



Wenn gleichzeitig andere Geräte am Patienten verwendet werden, muss gewährleistet werden, dass die Summe der Ableitströme aller angewendeten Geräte den zulässigen Grenzwert nicht überschreitet.



Schließen Sie bei Verdacht auf Fehlfunktion kein weiteres Gerät am Patienten an. Fragen Sie Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich direkt an unseren Service.

Beschädigung

Es dürfen nur Geräte verwendet werden, die auch äußerlich völlig intakt sind.

Schäden am Gehäuse können dazu führen, dass die Isolation des Anwendungsteils unwirksam wird. Das kann zu Gefährdungen führen.

Achten Sie auch darauf, dass die Isolationen des Patientenkabels unbeschädigt ist. Wenn die Verbindung zwischen Stecker und Leitung nicht mehr stabil ist, stellt das nicht nur ein Sicherheitsrisiko dar, sondern es können auch Funktionsstörungen auftreten.



Verwenden Sie niemals ein EKG-Gerät, dessen Gehäuse oder Leitungen beschädigt sind. Achten Sie besonders darauf, dass das Patientenkabel nicht geknickt wird und nicht an scharfen Kanten beschädigt werden kann.

Reparatur

Das Gerät darf nur vom Hersteller oder von einem dafür autorisierten Vertragspartner repariert werden. Eingriffe von unberechtigten Firmen oder Personen können eine potentielle Gefährdung zur Folge haben und führen zum Verlust der Garantie. Wenden Sie sich im Servicefall an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Service.



Führen Sie keine Veränderungen am Gerät durch. Jede Veränderung gegenüber dem Auslieferungszustand kann zu Gefährdungen führen.

Reinigung und Desinfektion

Über die Reinigung / Desinfektion aus hygienischen Gründen sowie die Reinigungsintervalle entscheidet der Anwender.

Wichtig! Beachten Sie unbedingt die Produktinformationen und die Sicherheitsdatenblätter des Herstellers der Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Anwendung dieser Produkte, sowie die folgenden, spezifischen Hinweise zu Reinigung / Desinfektion des EKG-Gerätes, des Ergometriegurtes und des Patientenkabels.

Bei der Verwendung anderer Desinfektionsmittel, die nicht von AMEDTEC empfohlen sind, ist der Anwender für den Nachweis der schadlosen Verwendung verantwortlich. Verwenden Sie nur Desinfektionsmittel die auf dem Produkt keine Rückstände hinterlassen und die für den Kontakt mit der Haut geeignet sind.

Für die Reinigung des Gehäuses und des Patientenkabels empfiehlt AMEDTEC ein feuchtes ungefärbtes Einmalgebrauchstuch.

Für die Reinigung des Ergometriegurtes empfiehlt AMEDTEC neodisher® MediClean forte, ein alkalisches Reinigungsmittel mit Tensiden des Herstellers Dr. Weigert GmbH & Co.KG.

Für die Desinfektion werden folgende Mittel des Herstellers Schülke & Mayr GmbH empfohlen:

terralin® liquid

mikrozyd® AF

mikrozyd® sensitive

CardioPart 12 Blue



Reinigen und desinfizieren Sie das Gerät nur, wenn Sie die Batterien entnommen haben und das Geräts nicht mit dem Patienten verbunden ist.

In das Gerät darf keine Flüssigkeit eindringen. Tauchen Sie es niemals in Reinigungs- oder Desinfektionsflüssigkeit, auch nicht teilweise. Benutzen Sie keine Sprühflasche zum Aufbringen des Desinfektionsmittels, sondern grundsätzlich nur ein feuchtes Desinfektionstuch oder die gebrauchsfertigen mikrozyd® sensitive Wipes. Achten Sie darauf, dass keine überschüssige Flüssigkeit beim Wischen über Kanten und Öffnungen der Gehäuseschalen abgestreift wird, die dann ins Innere des Gerätes gelangen könnte. Durch Aufkonzentration der Wirkstoffreste könnte dies zu Oxydationserscheinungen mit anschließendem Funktionsverlust führen. Sensible Stellen sind die Stecker-Öffnung und das Batteriefach. Entfernen Sie stets alle Wirkstoffreste nach der Einwirkzeit und lassen Sie das Gerät vor der Wiederverwendung unbedingt vollständig abtrocknen.

Sollte doch Flüssigkeit in das **CardioPart 12 Blue** eingedrungen sein, ziehen Sie das Gerät bitte unverzüglich aus dem Verkehr und senden es zur Überprüfung an ihren Fachhändler oder direkt unseren Service.

Hinweis: Zur Gewährleistung des erforderlichen hygienischen Standards bei minimalem Desinfektionsaufwand empfiehlt AMEDTEC die Verwendung von

- Einmal-Hygiene-Taschen (Art.-Nr.: 016.0233) in Verbindung mit dem
- Umhängeband für einmaligen Gebrauch (Art.-Nr.: 019.0619).

Bei dieser Applikation ist das **CardioPart 12 Blue**, einschließlich des Steckers des Patientenkabels vor dem Kontakt mit dem Patienten geschützt.

Patientenkabel

Tauchen Sie das Patienten-kabel niemals in Reinigungs- oder Desinfektionsflüssigkeit, auch nicht teilweise. Benutzen Sie keine Sprühflasche zum Aufbringen des Desinfektionsmittels, sondern grundsätzlich nur ein feuchtes Desinfektionstuch oder die gebrauchsfertigen mikrozyd® sensitive wipes. Achten Sie darauf, dass keine überschüssige Flüssigkeit beim Wischen in den Kabelstecker gelangt. Durch Aufkonzentration der Wirkstoffreste an den Steckerkontakten könnte dies zu Oxydationserscheinungen mit anschließendem Funktionsverlust führen. Entfernen Sie stets alle Wirkstoffreste nach der Einwirkzeit und lassen Sie das gereinigte / desinfizierte Patienten-kabel unbedingt restlos abtrocknen. Sollte doch einmal Flüssigkeit in den Stecker eingedrungen sein, dann senden Sie die Patienten-kabel zur Überprüfung an AMEDTEC.

Ergometriegurt

Wir empfehlen eine manuelle Reinigung im Tauch- oder Ultraschallbad in einer Anwendungslösung von 3%, bei maximal 40°C, 5 – 10 min. Der Klettverschluss sollte während der Reinigung geschlossen sein. Die neodisher® MediClean forte-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise voll entsalzt) abzuspülen.

Bei der Verwendung anderer Reinigungsmittel, zum Beispiel handelsübliche Feinwaschmittel, bis 40°C, ist der Anwender für den Nachweis der schadlosen Verwendung verantwortlich. Verwenden Sie dabei niemals Mittel, die Rückstände auf dem Produkt hinterlassen.

Die Desinfektion des Ergometriegurtes kann im Tauchbad erfolgen. Das Desinfektionsmittel kann aufgesprüht oder mittels Desinfektionstücher aufgebracht werden.

Bei der Verwendung anderer Desinfektionsmittel, die nicht von AMEDTEC empfohlen sind, ist der Anwender für den Nachweis der schadlosen Verwendung verantwortlich.

Lassen Sie den desinfizierten Ergometriegurt unbedingt restlos abtrocknen.

Sicherheitstechnische Kontrollen

Zeitintervall

AMEDTEC empfiehlt die Durchführung von Sicherheitstechnische Kontrollen (STK) nach jeweils 2 Jahren. Bitte wenden sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Service.

EKG-Gerät CardioPart 12 Blue

Isolationsprüfung

Geprüft wird die Isolation des schutzisolierten Anwendungsteils. Die Prüfspannung ist anzulegen zwischen allen Elektroden, die untereinander kurzgeschlossen sein müssen und einer Metallfolie, die das Gehäuse in einem Abstand von 8mm zum Patientenstecker umschließt.

Prüfspannung: 1500 V_{rms} / 50 bzw. 60 Hz
Prüfdauer: 60 Sekunden

Ableitstrommessung

Zu messen sind der Patientenableit- und der Berührungsstrom.

Kontrolle auf mechanische Beschädigungen

Die mechanische Kontrolle ist eine Sichtkontrolle. Dabei ist besonders auf folgendes zu achten:

1. Das Gehäuse darf keinerlei Beschädigungen aufweisen.
2. Der Stecker des Patientenkabels soll fest sitzen und darf sich bei verschraubter Arretierung nicht bewegen lassen.
3. Das Patientenkabel darf keine Beschädigungen aufweisen. Achten Sie besonders darauf, dass Stecker oder Clips fest mit dem Kabel verbunden sind.

System

Kontrollieren Sie immer das gesamte System. Beziehen Sie unbedingt den **Sicherheitstrenntrafo** sowie den PC und alle weiteren elektrisch verbundenen Geräte ein.

Isolationsprüfung

Das System umfasst mehrere Isolationen. Diese sind einzeln und nacheinander zu prüfen. Die Geräte sind bei der Prüfung elektrisch voneinander zu trennen. Die Prüfspannung ist der Sicherheitsnorm für das jeweilige Gerät zu entnehmen.

Ableitstrommessung

Bei der Messung der Ableitströme müssen alle Geräte entsprechend ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch elektrisch zusammengeschaltet sein.



Sicherheitstechnische Kontrollen sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Service.

Funktionsprüfung

1. Die Elektrodenleitungen des Patientenkabels dürfen weder untereinander noch gegenüber dem Kabelschirm eine elektrisch leitende Verbindung haben.
Auch hochohmige Verbindungen führen bereits zu Verfälschungen im EKG. Hochohmige Verbindungen sind schwer festzustellen. Verwenden Sie deshalb ein entsprechendes Messgerät.
Das gleiche gilt sinngemäß auch für die Saugelektrodenanlage.

Beschaltung des Steckverbinders:

	Schirm	N	R	L	F	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kontakt	6	14	9	10	11	12	1	2	3	4	5

2. Schließen Sie einen kalibrierten Signalgeber 10 Hz / 2 mVss nacheinander an die Elektrodenleitungen R, L, F, C1 bis C6 an. Die restlichen 9 Elektroden werden zusammengeschaltet und bilden den Bezugspunkt. Verwenden Sie das Ableitprogramm I, II, III, aVR, aVL, aVF, C1 bis C6 und schalten Sie alle Filter aus. Die dargestellten Signale dürfen unter Berücksichtigung der Ableitungsberechnung auf allen Ableitungen nicht mehr als 5 % vom Sollwert abweichen. Kontrollieren Sie das entweder auf dem Monitor oder auf dem Ausdruck.



**Funktionsprüfungen sind von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen.
Bitte wenden Sie sich an ihren Fachhändler oder direkt an unseren Service.**



Service

Vor der Einsendung von Geräten oder Zubehör an AMEDTEC, z.B. zur Inspektion oder Reparatur, muss eine ordnungsgemäße Reinigung und Desinfektion erfolgen. Eine schriftliche Bestätigung der erfolgten Reinigung und Desinfektion ist der Sendung beizulegen.

Servicenummer

Sie erreichen unseren Service unter der Telefonnummer: +49 (0) 3771 59827 50

Aufbau und Bedienelemente

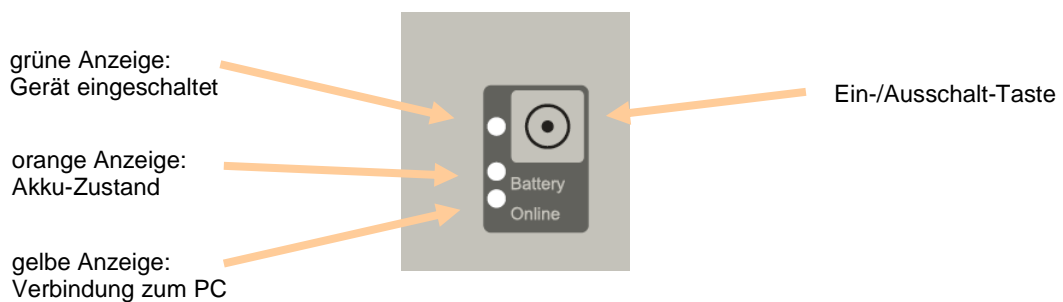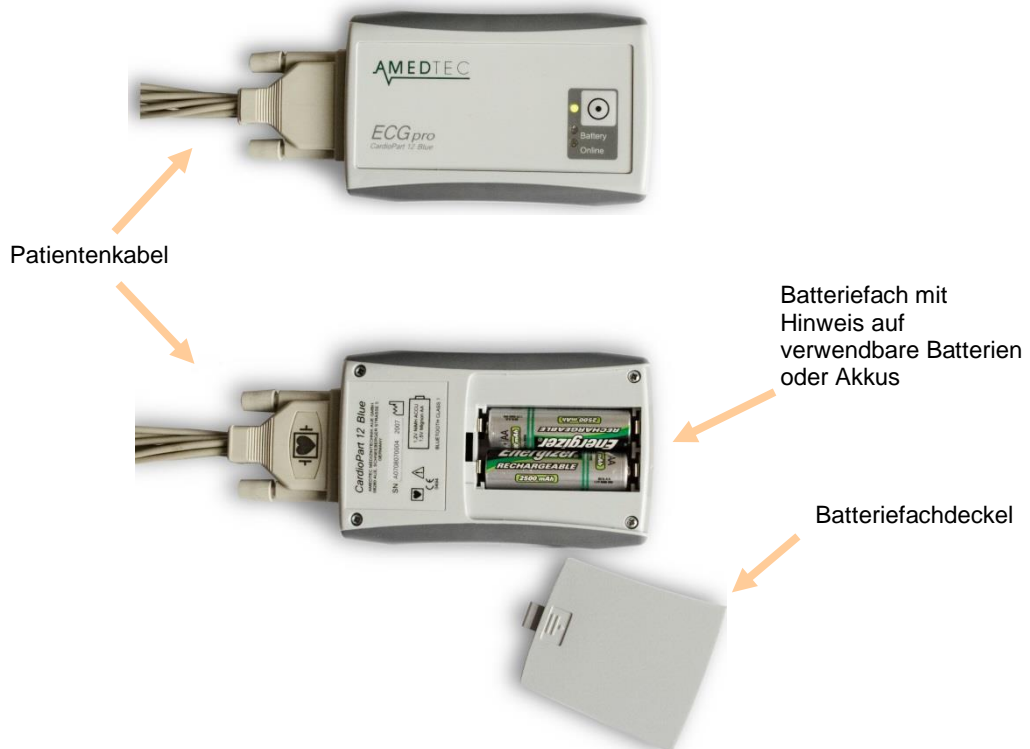

Die Taste für das Ein-/Ausschalten des **CardioPart 12 Blue** kann bei Geräten mit einer Seriennummer größer SN A101107093 auch zum Starten und Stoppen von EKG-Aufzeichnungen verwendet werden. Lesen Sie hierzu im Dokument **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** den Abschnitt **CardioPart 12 Blue**.

Inbetriebnahme

Anschließen der Geräte

1. Netzanschluss

Betreiben Sie alle Geräte, die zum EKG-System gehören, am gleichen Stromkreis. Dazu können außer PC, Monitor und Drucker auch Saugelektrodenanlagen, Fahrradergometer, Laufbänder, Blutdruckmessgeräte sowie weitere Geräte gehören.

Stellen Sie PC, Monitor und Drucker so auf, dass der Abstand zwischen diesen Geräten und dem Patienten **mindestens 1,5 Meter** beträgt. Wenn dieser Abstand nicht gewährleistet ist, müssen diese Geräte über einen Sicherheitstrenntrafo betrieben werden.



Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf den Seiten Fehler! Textmarke nicht definiert. ff.

2. EKG-Gerät CardioPart 12 Blue

Um das Gerät betreiben zu können, muss auf dem PC die zugehörige Software AMEDTEC ECGpro installiert sein.

- ☞ Sollte **AMEDTEC ECGpro** noch nicht auf dem PC installiert sein, so führen Sie bitte zuerst die Installation aus. Verwenden Sie dazu die beiliegende Installations-CD und folgen Sie den Hinweisen in der Installationsanweisung.
- ☞ Schließen Sie den mitgelieferten Bluetooth-Dongle an einem freien USB Port Ihres PCs an.

Setzen Sie geladene Akkus oder neue Batterien in das EKG-Gerät ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Schalten Sie das EKG-Gerät ein. Der eingeschaltete Zustand wird mit der grünen Anzeige signalisiert.

Hinweis: Das Gerät schaltet sich bei Nichtverwendung automatisch nach 5 Minuten aus. In dieser Zeit sollte die Verbindung hergestellt werden.

Beachten Sie bitte, dass maximal 16 PC-Paarungen in einem CardioPart 12 Blue gespeichert werden können.

Zum Rücksetzen der Paarungen müssen Geräte bis Seriennummer A1308070602 eingesendet werden.

Ab Seriennummer A1308070603 kann das Rücksetzen auf Wunsch selbständig wie folgt vorgenommen werden:

1. **CardioPart 12 Blue** einschalten.
2. Einschaltknopf 10 Sekunden gedrückt halten bis beide LEDs (*Battery* und *Online*) zu leuchten beginnen.
3. Einschaltknopf loslassen.
4. Nach 1 Sekunde den Einschaltknopf wieder drücken und gedrückt halten. Beide LEDs beginnen zu blinken. – Einschaltknopf weiter gedrückt halten, bis beide LEDs nicht mehr blinken, dann erst Einschaltknopf loslassen.
5. Die Liste der Paarungen im Gerät ist nun gelöscht.

Aktivieren Sie jetzt das EKG-Gerät in den AMEDTEC *ECGpro* - Einstellungen. Lesen Sie hierzu die Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen**, Abschnitt 3.12.1: **CardioPart 12 Blue**. Die Anleitung finden Sie nach dem Start von AMEDTEC *ECGpro* im Menü „Hilfe | Dokumente“.

3. Belastungsgerät

Schließen Sie an den PC ein Fahrradergometer oder Laufband an, wenn Belastungs-Untersuchungen durchgeführt werden sollen.

AMEDTEC *ECGpro* steuert die im Abschnitt **Belastungsgerät** auf Seite **20** gelisteten Ergometer und Laufbänder.

- ☞ Verbinden Sie die RS232-Schnittstelle des Belastungsgerätes mit einer RS232-Schnittstelle des PCs. Verwenden Sie für die Geräte der Typen EGT und Ergoselect das **Interfacekabel Elmed / ergoselect**, Art.-Nr. 018.0102. Sollte keine RS232-Schnittstelle verfügbar sein, so verwenden Sie einen USB-Konverter.

Nicht alle USB-Konverter eignen sich für den Anschluss von Belastungsgeräten. Bitte verwenden Sie deshalb nur von AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH gelieferten USB-Seriell-Konverter, Art.-Nr. 001 659.

4. Blutdruckmessgerät

Verwenden Sie ein Fahrradergometer mit integriertem Blutdruckmodul oder ein externes Blutdruckmessgerät, wenn Sie den Blutdruck automatisch messen wollen.

AMEDTEC *ECGpro* steuert folgende Blutdruckmessgeräte:

- Blutdruckmessgerät *Tango*
- Blutdruckmessgerät *Cycle*
- Blutdruckmessgerät *Spengler*
- Blutdruckmessgerät *Metronik BL-6*

Anschluss des Blutdruckmessgerätes *Tango* bei Verwendung des CardioPart 12 Blue

- ☞ Verbinden Sie die RS232-Schnittstelle des *Tango* mit dem **QRS Trigger Empfangsmodul CardioPart 12 Blue → Tango-PC**, Art.-Nr. 016.0270.
- ☞ Schließen Sie das Empfangsmodul über den USB-Stecker an einem USB-Port des PCs an.
- ☞ Verbinden Sie den QRS-Trigger-Eingang des *Tango* mit dem BNC-Stecker des Empfangsmoduls.

Anschluss des Blutdruckmessgerätes *Cycle*

- ☞ Verbinden Sie die RS232-Schnittstelle des Blutdruckmessgerätes mit einer RS232-Schnittstelle des PCs. Verwenden Sie dazu das **RS-Kabel Tango-PC**, Art.-Nr. 001.585. Sollte keine RS232-Schnittstelle verfügbar sein, so verwenden Sie PC-seitig einen USB-Seriell-Konverter.

Nicht alle USB-Konverter eignen sich für den Anschluss von Blutdruckmessgeräten. Bitte verwenden Sie deshalb nur den von AMEDTEC gelieferten USB-Seriell-Konverter, Art.-Nr. 001 659.

Anschluss des Blutdruckmessgerätes *Spengler*

- ☞ Verbinden Sie die USB-Schnittstelle des Blutdruckmessgerätes mit einem USB-Port des PCs.

Anschluss des Blutdruckmessgerätes *Metronik BL-6*

- ☞ Verbinden Sie die RS232-Schnittstelle des Blutdruckmessgerätes mit einer RS232-Schnittstelle des PCs. Verwenden Sie dazu das Interfacekabel Ergometer, Art.-Nr. 018.0102. Alternativ können Sie auch das zum Lieferumfang des Blutdruckmessgerätes gehörende USB-Kabel verwenden, um eine USB-Verbindung herzustellen.

Allgemeine Einstellungen

1. Installation der Anwendersoftware AMEDTEC ECGpro

Sollte die Software AMEDTEC ECGpro noch nicht auf dem PC installiert sein, so führen Sie bitte zuerst die Installation aus.


Verwenden Sie dazu die beiliegende Installations-CD und folgen Sie den Hinweisen in der **AMEDTEC ECGpro Installationsanleitung**.

2. Benutzerverwaltung

Starten Sie AMEDTEC ECGpro wie im Abschnitt **Programmstart** auf Seite 22 beschrieben.

Sollte die Anmeldung fehlschlagen, prüfen Sie bitte, ob Sie in der Benutzerverwaltung als aktiver Benutzer eingetragen sind.

☞ Wählen Sie im Windows-Startmenü: **Start ▶ Programme ▶ AMEDTEC ECGpro ▶ AMEDTEC ECGpro Benutzerverwaltung**. Es erscheint das AMEDTEC ECGpro Login für die Datenbankverwaltung

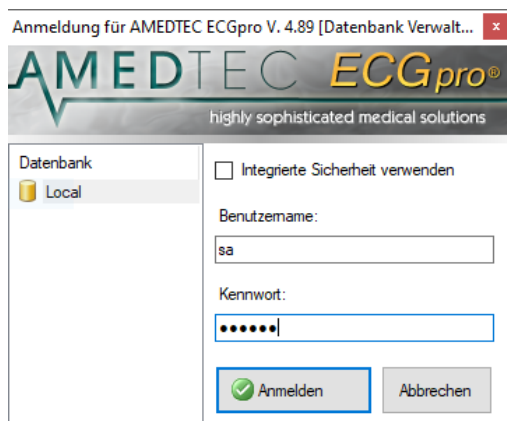

☞ Melden Sie sich mit dem Benutzernamen „sa“ und dem bei der Installation des MSSQL Servers verwendeten „Strong Password“ an.

Wenn die Datenbank lokal installiert ist, können Sie sich als Windows-Administrator mit Integrierter Sicherheit anmelden. In diesem Fall brauchen Sie kein Kennwort.

Handelt es sich um eine Netzwerkinstallation, müssen Sie außerdem auch Administratorrechte für den PC haben, auf dem die Datenbank installiert ist.

☞ Klicken Sie auf die Checkbox **Integrierte Sicherheit verwenden**.

Jetzt wird Ihr Windows-Benutzername angezeigt und Sie können sich anmelden. Siehe auch Abschnitt **Als Benutzer anmelden** auf Seite 22.

Wenn Sie sich erneut anmelden, kann die Option **Integrierte Sicherheit verwenden** bereits aktiviert sein.

☞ Tragen Sie sich als aktiven Benutzer ein.

Lesen Sie dazu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Benutzerverwaltung**.

☞ Wenn erforderlich, richten Sie weitere Benutzer ein. Das können Sie aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt im Menü „Datei | Einstellungen... | Sicherheit | Benutzerverwaltung“ nachholen.

3. EKG-Gerät CardioPart 12 Blue aktivieren

Die Bluetooth EKG-Geräte sind werksseitig nicht als Erfassungsgeräte aktiviert.

Bevor ein CardioPart 12 Blue-Gerät verwendet werden kann, muss die Verwendung von Bluetooth EKG-Erfassungsgeräten an dem betreffenden PC einmalig aktiviert werden, und das konkrete **CardioPart 12 Blue**-Gerät zur Liste der verwendbaren Geräte hinzugefügt werden.

☞ Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle für den Bluetooth-Dongle eingerichtet wurde und der Bluetooth-Dongle am PC angesteckt ist.

☞ Öffnen Sie das Menü „Datei | Einstellungen... | 12-Kanal-EKG | EKG-Geräte | CardioPart 12 Blue“ und aktivieren Sie die Checkbox **CardioPart 12 Blue verwenden**.

☞ Schalten Sie das **CardioPart 12 Blue**-Gerät ein.

☞ Starten Sie die Bluetooth-Suche nach dem Gerät, indem Sie in der Liste der verwendbaren Geräte auf den Button **Suchen** klicken.

Als Ergebnis der Suche wird das Erfassungsgerät in der Liste angezeigt.

☞ Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Geräte, indem Sie die zugehörige Checkbox anklicken.

4. Klinik-Daten

☞ Tragen Sie im Menü „Datei | Einstellungen... | Allgemein | Klinik-Daten“ den Namen der Praxis bzw. der Klinik mit Adresse und Telefon-Nummer ein.

Diese Daten werden auf jedem Ausdruck der Module 12-Kanal-EKG, Holter-EKG und Holter-RR ausgegeben.

5. Untersuchungen auswählen

- ☞ Wählen Sie unter „*Datei | Einstellungen... | 12-Kanal-EKG | Untersuchungen*“ in der Gruppe **Untersuchungen** aus, welche Untersuchungen an diesem Arbeitsplatz durchgeführt werden sollen.
- ☞ Deaktivieren Sie alle anderen Untersuchungen.
- ☞ Deaktivieren Sie alle Untersuchungen, wenn der Arbeitsplatz nicht für EKG-Aufzeichnungen genutzt werden soll. Beachten Sie in diesem Fall das **Startverhalten** (nächster Gliederungspunkt).

6. Startverhalten einstellen

- ☞ Öffnen Sie das Menü „*Datei | Einstellungen... | Allgemein | System*“.
- ☞ Wählen Sie **Start mit Untersuchung**, wenn die Software nach dem Programmstart und nach dem Speichern in eine voreingestellte Untersuchung zurückkehren soll.
Werkseitig ist die Untersuchung **Ruhe 12** eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie eine andere Untersuchung aus. Zur Auswahl stehen die im vorangegangenen Punkt aktivierten Untersuchungen.
- ☞ Wählen Sie **Start mit Modul Datenmanagement**, wenn Sie immer in der Patienten- bzw. Aufnahmeverwaltung (Patientensuche) starten und auch nach dem Speichern dorthin zurückkehren wollen.

7. Druckformate

- ☞ Öffnen Sie das Menü „*Datei | Einstellungen... | 12-Kanal-EKG | Drucker*“.
- ☞ Stellen Sie für jede der Aufnahme-Typen Ruhe-EKG, Rhythmus-EKG und Belastungs-EKG eine Auswahl von Druckformaten zusammen, indem Sie Formate von der linken Auswahlbox in die rechte Box verschieben. Aus diesen Druckformaten können Sie später bei jedem Druckvorgang auswählen.
- ☞ Aktivieren Sie in der Box **Verwendete Druckformate** die Checkbox für die Formate, die als Standard gedruckt werden sollen.
- ☞ Druckformate und Druckparameter können für jede Untersuchung von den hier eingestellten Werten abweichen. Lesen Sie hierzu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** den Abschnitt **Untersuchungen**.

8. Drucker

Werkseitig wird das EKG auf das in Ihrem System als **Standarddrucker** eingestellte Gerät ausgegeben. Sie können einen anderen Drucker einstellen

- ☞ Öffnen Sie das Menü „*Datei | Einstellungen... | Allgemein | Drucker und Scanner*“ und wählen Sie einen Standarddrucker aus.

Einstellungen für die Ergometrie

1. Belastungsgerät

☞ Aktivieren Sie das Fahrrad / Laufband und nehmen Sie im Gerätetreiber die erforderlichen Einstellungen vor.

Lesen Sie hierzu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Geräte**.

AMEDTEC ECGpro steuert folgende Ergometer und Laufbänder:

Gerät	Einstellung in AMEDTEC ECGpro
Fahrradergometer ergoselect 50, 100, 150, 200, 400, 600, 1000, 1100, 1200, 4, 5, 10, 12	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder ergoselect</i>
Viasprint 200P	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder ergoselect</i>
Liegeergometer ergoselect 1000 L	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder ergoselect</i>
Stressecho-Kardiografie Ergometer ergoselect 1200 EL	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder ergoselect</i>
Stress Echo Table 100 MED	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder ergoselect</i>
Fahrradergometer ergometrics 900	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder ergometrics 900</i>
Fahrradergometer EGT 2100 / 2200	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder EGT 2100 / 2200</i>
Fahrradergometer der Fa. Lode	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder Lode</i>
Fahrradergometer mb1 ... mb4	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder Medical Bike</i>
Fahrradergometer SanaBike 150 / 250	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Fahrräder SanaBike 150 / 250</i>
Laufband RAM 770, RAM 860, RAM 870	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder RAM</i>
Laufband RAM 880, RAM 890	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder RAM</i>
Laufband h/p/cosmos	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder h/p/cosmos</i>
Laufband Trackmaster	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder Trackmaster</i>
Laufband Daum	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder Daum</i>
Laufband Lode	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder Lode</i>
Laufband T-2000, T-2100	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder T-2000 / T-2100</i>
Laufband Quinton	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder Quinton</i>
Laufband ACT	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Laufbänder ACT</i>

☞ Nehmen Sie die Einstellungen am Belastungsgerät vor.

Lesen Sie hierzu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Geräte** und folgen Sie außerdem der Gebrauchsanweisung, die dem Belastungsgerät beiliegt.

2. Blutdruckmessgerät

- ☞ Aktivieren Sie das Blutdruckmessgerät und nehmen Sie im Gerätetreiber die erforderlichen Einstellungen vor.
Lesen Sie hierzu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Geräte**.

Gerät	Einstellung in AMEDTEC ECGpro
Blutdruckmessgerät Tango (Fa. SunTech)	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Blutdruckmessgeräte SunTech Tango</i>
Blutdruckmessgerät Cycle (Fa. SunTech)	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Blutdruckmessgeräte SunTech Tango</i>
Blutdruckmessgerät Spengler	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Blutdruckmessgeräte Spengler SCVL-2007</i>
Blutdruckmessgerät Metronik BL-6	<i>Datei Einstellungen... 12-Kanal-EKG Blutdruckmessgeräte Metronik BL-6</i>

- ☞ Nehmen Sie die Einstellungen am Blutdruckmessgerät vor.
Lesen Sie hierzu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Geräte** und folgen Sie außerdem der Gebrauchsanweisung, die dem Blutdruckmessgerät beiliegt.
- ☞ Bei Verwendung des Blutdruckmessgerätes Tango muss der QRS-Trigger-Ausgang eingeschaltet werden.

Blutdruckmessgerät Tango und CardioPart 12 Blue

- ☞ Aktivieren Sie im Menü „Datei | Einstellungen... | 12-Kanal-EKG | EKG-Geräte | CardioPart 12 Blue“ die Checkbox **QRS-Trigger verwenden**.
- ☞ Tragen Sie in das Feld **Code für QRS-Triggermodule** die Kennung des **QRS Trigger Empfangsmoduls CardioPart 12 Blue → Tango-PC** ein.
Lesen Sie hierzu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **EKG-Geräte / CardioPart 12 Blue**.

3. Belastungsprofil

Jeder Belastungsuntersuchung ist werksseitig ein Belastungsprofil zugeordnet.

Wenn Sie ein anderes Profil verwenden wollen

- ☞ Wählen Sie in „Datei | Einstellungen... | 12-Kanal-EKG | Untersuchungen“ die Belastungsuntersuchung aus, für die Sie ein anderes Profil aussuchen möchten.
- ☞ Klicken Sie auf die Registerkarte **Belastungseinstellungen**.
- ☞ Wählen Sie ein Belastungsprofil aus.

Wenn Sie ein Profil ändern wollen

- ☞ Öffnen Sie das Menü „Datei | Einstellungen... | 12-Kanal-EKG | Profildefinitionen.“
- ☞ Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- ☞ Ändern Sie die Last, die Länge der Laststufen oder die Zeitpunkte für Blutdruckmessung und Speichern von EKG-Abschnitten.
Lesen dazu in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** den Abschnitt **12-Kanal-EKG / Profildefinition**.



Die folgenden Seiten geben Ihnen einen Überblick über die Bedienung des Programms **AMEDTEC ECGpro**. Eine ausführliche Beschreibung lesen Sie in der Gebrauchsanweisung **AMEDTEC ECGpro CardioPart 12**. Diese finden Sie im Menü „Hilfe ► Dokumente“ und auf der Programm-DVD.

Programmstart

Start



So starten Sie das Programm AMEDTEC *ECGpro*:

- ☞ Klicken Sie auf das Desktopsymbol doppelt oder
- ☞ Wählen Sie im Windows-Startmenü:
Start | Alle Programme | AMEDTEC ECGpro | AMEDTEC ECGpro.

Mit einem Link in der Autostartgruppe kann das Programm beim Einschalten des PC automatisch gestartet werden.

Als Benutzer anmelden

ECGpro verlangt die Legitimation des Benutzers, der sich am Programm anmeldet. Bevor das Programm startet wird der Anmeldedialog angezeigt.

Der Benutzername, der bei der Windowsanmeldung verwendet wurde, wird automatisch in das Feld **Benutzername** eingetragen, wenn der angemeldete Windowsbenutzer auch ein aktiver AMEDTEC *ECGpro* Benutzer ist.

- ☞ Tragen Sie Ihren Benutzernamen ein, wenn dieser nicht angezeigt wird.
- ☞ Tragen Sie Ihr Kennwort ein.
- ☞ Klicken Sie auf **Anmelden** oder drücken Sie die Taste **ENTER**.
- ☞ Aktivieren Sie die Option **Integrierte Sicherheit verwenden**, wenn Sie auf die Anmeldung in Zukunft verzichten wollen. In diesem Fall übernimmt AMEDTEC *ECGpro* Ihre Benutzerdaten von der Windows-Anmeldung. Mit dem Setzen der Option werden die Eingabefelder deaktiviert. Was dabei zu beachten ist, lesen Sie in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Benutzerverwaltung**.

Als anderer Benutzer anmelden

Verwenden Sie diese Funktion, wenn

- Sie sich an AMEDTEC ECGpro anmelden wollen, an dem bereits ein Benutzer angemeldet ist oder
- wenn Sie die Option **Integrierte Sicherheit verwenden** ausschalten wollen.

Gehen Sie wie folgt vor:

- ☞ Öffnen Sie das Menü **Datei** und wählen Sie **Als anderer Benutzer anmelden...** (die Funktion ist während der Erfassung und beim Auswerten einer Aufnahme deaktiviert).




- ☞ Deaktivieren Sie die Option **Integrierte Sicherheit verwenden**, wenn diese eingeschaltet ist. Die Eingabefelder werden aktiviert.
- ☞ Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein
- ☞ Klicken Sie auf **Anmelden** oder drücken Sie die Taste **ENTER**

Kennwort ändern

Wenn Sie Ihr bisheriges Kennwort durch ein neues ersetzen wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- ☞ Öffnen Sie das Menü **Datei** und wählen Sie **Kennwort ändern...**

Dieser Menüeintrag ist nur verfügbar, wenn Sie nicht mit **Integrierter Sicherheit** angemeldet sind.

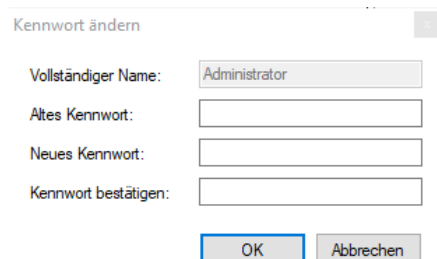

- ☞ Tragen Sie Ihr bisheriges und Ihr neues Kennwort ein
- ☞ Tragen Sie Ihr neues Kennwort nochmals als Bestätigung ein
- ☞ Klicken Sie auf **OK** oder drücken Sie die Taste **ENTER**

Startoptionen

Das Programm startet entweder


- im Modul **Datenmanagement** oder
- in der **EKG-Erfassung** für das Sofort-EKG, lesen Sie hierzu den Abschnitt **Sofort-EKG aufzeichnen** auf Seite **25** oder
- in der **EKG-Erfassung** für das Ruhe-EKG, lesen Sie hierzu den Abschnitt **Standard Ruhe-EKG aufzeichnen** auf Seite **27** oder
- in der **EKG-Erfassung** für das Rhythmus-EKG oder
- in der **EKG-Erfassung** für das Belastungs-EKG, lesen Sie hierzu den Abschnitt **Belastungs-EKG aufzeichnen** auf Seite **29**.

Die Auswahl der Startoption ist in der Anleitung **AMEDTEC ECGpro Einstellungen** im Abschnitt **Allgemein / System** beschrieben.

Patientendaten

Wenn Sie die werkseitigen Einstellungen nicht verändert haben, beginnen Sie nach dem Start des Programms mit dem orangefarbenen Button „**Patient wählen**“.


1a Wählen Sie in der EKG-Erfassung den Patienten.

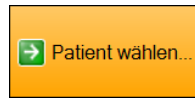

Öffnen Sie mit diesem Button den **Patientendaten** Dialog.

Suchen Sie in diesem Feld auf Patientennamen, Patientennummer oder Geburtsdatum. Hierzu tragen Sie den vollständigen Namen / Vornamen oder die ersten Zeichen ein. Tragen Sie die Patientennummer vollständig oder teilweise ein. Oder suchen Sie auf das vollständige Geburtsdatum.

Klicken Sie auf den Button .

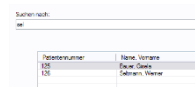

Wenn Ihre Angaben nicht vollständig sind, wird ggf. eine Liste mit mehreren Einträgen angezeigt, aus der Sie den richtigen auswählen müssen.

Beispiel:

Wenn Sie in das Feld „Suchen nach“ die Buchstaben „sel“ eingeben, wird der Patient **S**eltmann, aber nicht **G**isela gefunden.

Drücken Sie den Button , um einen neuen Patienten anzulegen.

1b Wählen Sie den Patienten im Daten-Management.



Wählen Sie im **Datenmanagement** auf der Karteikarte **Suche** den betreffenden Patienten aus.


Gehen Sie hierbei wie unter **1a** beschrieben vor.

2 Neuer Patient



Verwenden Sie diesen Button, um einen neuen Patienten einzugeben.

2a Patientendaten eingeben

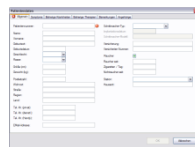

Die Patientenmaske können Sie in „Datei | Einstellungen... | Datenbank | Patienten-Details“ vordefinieren. Hierbei werden sowohl die Karteikarten als auch die Eingabefelder beeinflusst.

Felder mit Pflichteingaben und Felder mit ungültigen Eingaben sind durch ein Ausrufezeichen im roten Kreis gekennzeichnet.

3 Patient



Wenn bereits ein Patient ausgewählt wurde (Name wird in der Kopfzeile angezeigt), öffnen Sie mit diesem Button den Dialog mit **Patientendaten**.





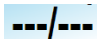




Ist kein Patient ausgewählt, öffnen Sie mit diesem Button den Dialog zur Suche eines Patienten oder zur Eingabe eines neuen Patienten-Datensatzes.

EKG-Erfassung


Sofort-EKG aufzeichnen

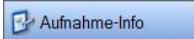Verwenden sie das Sofort-Programm, wenn die Patientendaten noch nicht im System eingetragen sind. Die Aufnahme wird zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Daten im AMEDTEC *ECGpro* bekannt sind, dem betreffenden Patienten zugewiesen.


Für das Sofort-Programm steht in AMEDTEC *ECGpro* zusätzlich eine Rhythmus-Variante bereit. Mit diesem Programm speichern Sie EKG über einen beliebigen Zeitraum und es können mehrere Abschnitte analysiert werden.

Verwenden Sie die Funktionen unter Optionen nur, wenn Sie von der Routine abweichen wollen.			
	Routine	Tastatur	Optionen
<p>1 Wählen Sie das Sofort-Programm aus.</p> <p>Es erfolgt keine Eingabe von Patientendaten.</p>		Strg+1	<p>Sie können alternativ auch ein Rhythmus-Notprogramm im Menü: „Datei Einstellungen... 12 Kanal-EKG Untersuchungen“ einstellen, wenn Ihr Erfassungsgerät über die Option mr, i, s oder as verfügt..</p>
			<p>Ruhe Sofort-EKG Unbekannt 26.02.2020 15:24:36 ←→ 25mm/s ↓ 10mm/mV →</p>
<p>2 Legen Sie die Elektroden an.</p> <p>Im Elektrodenanlageschema blinken fehlerhaft angelegte Elektroden. Prüfen Sie in der EKG-Vorschau die Aufnahmequalität.</p>			<p>Klicken Sie in das weiße Feld und ändern Sie den vorgegebenen Text, um den Patienten später besser zu identifizieren (z. Bsp.: „Unfall auf Baustelle“).</p>
		F3	<p> Muskel</p> <p>Schalten Sie das Filter nur ein, wenn sich keine ausreichende Aufnahmequalität erzielen lässt.</p>
		Shift+F3	<p> Aufnahme-Info</p> <p>Tragen Sie einen Kommentar ein.</p>
			<p> BD mmHg</p> <p>Sie können ein angeschlossenes Blutdruckmessgerät starten oder</p>
		Klick	<p> mmHg</p> <p>den Blutdruck manuell eingeben.</p>
<p>3 Starten Sie die Aufzeichnung. Der Button wird erst aktiv, wenn alle Elektroden fehlerfrei angelegt sind.</p>		F2 oder 	
		Strg+S	<p> Start</p> <p>Sie können auch mit fehlerhaften Elektroden starten.</p>
		Strg+A	<p> Start Auto</p> <p>Starten Sie die Aufzeichnung für genau 10 Sekunden. Bei Elektrodenfehlern wird die Zeit zurückgesetzt. Nach Ablauf von 10 Sekunden wird die Aufzeichnung automatisch beendet.</p>


4 Beenden und Kontrollieren Sie die Aufzeichnung.

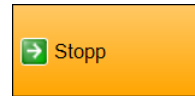

F2
oder
 Strg+T

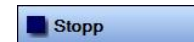

Strg+S
Strg+A

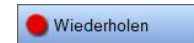

Im Gegensatz zum Ruhe-EKG beendet das Sofort-EKG die Aufzeichnung nicht automatisch. Sie müssen die Erfassung manuell beenden!
In der Kopfzeile werden die Hauptmesswerte für die letzten 10 Sekunden EKG angezeigt.

Alternativ kann die Aufzeichnung mit diesem Button beendet werden.

Wenn erforderlich, wiederholen Sie die Aufzeichnung im manuellen oder im Automatik-Mode. Die bisher erfassten Daten gehen dabei verloren.

Klicken Sie auf den Button **EKG**, um das mehrkanalige EKG auszuwerten.
Klicken Sie auf den Button **Messwerttabelle**, um alle Messwerte im QRS - Bereich, im ST- Bereich und im P - Bereich für jeden Kanal anzuzeigen.
Klicken sie auf den Button **Mittelwertschlag**, um den berechneten Mittelwertschlag mit den gefundenen Wellenpunkten ein- bzw. mehrkanalig anzuzeigen.


5 Drucken Sie das EKG.

Strg+F




Sie können die Standardformate in der Vorschau auf dem Bildschirm ansehen.

Strg+P

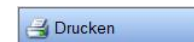


Drucken Sie die Aufzeichnung im Standardformat. Als Patienteninformation wird der Eintrag in der Kopfzeile verwendet (siehe Punkt 1).
Mit einem rechten Mausklick auf einen der beiden Buttons öffnen Sie den Dialog zur Auswahl der Druckformate und zum Verändern der eingestellten Druckparameter.

6 Speichern Sie die Erfassung.

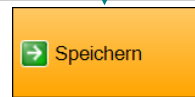

F2

Strg+X


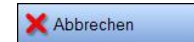


Die gespeicherten Daten finden Sie im Datenmanagement auf der Karteikarte **Nicht zugewiesene Untersuchungen** wieder.

Brechen sie ab, wenn Sie die Aufzeichnung nicht speichern möchten.

7 Weisen Sie die Erfassung einem Patienten zu.

Nachdem der Patient in das Datenmanagement aufgenommen wurde, kann die Aufnahme zugewiesen werden.

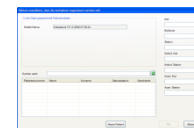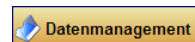




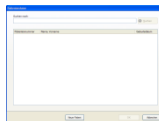







Öffnen Sie die Karteikarte Nicht zugewiesene Untersuchungen. Klicken sie auf die Aufnahme, die sie zuweisen wollen, doppelt.


Tragen Sie eine Zeichenkette ein, die im Namen, Vornamen und Patientennummer gesucht wird und klicken Sie den Button . Klicken Sie auf den betreffenden Patienten und bestätigen mit dem Button **OK**.

Standard Ruhe-EKG aufzeichnen

Im Folgenden werden die notwendigen Schritte zum Erfassung eines Ruhe-EKG beschrieben. Voraussetzung sind die Standardeinstellungen Ihres Systems. Sollten die Einstellungen modifiziert worden sein (Hinzufügen von weiteren Untersuchungen oder die Ankopplung an ein Praxis-System), können Abweichungen von dieser Beschreibung auftreten.

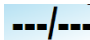Verwenden Sie die Funktionen unter Optionen nur, wenn Sie von der Routine abweichen wollen.

	Routine	Tastatur	Optionen
1	<p>Wählen Sie ein Untersuchungsprogramm aus.</p> 	Strg+2	Das Hinzufügen / Entfernen von Untersuchungsprogrammen erfolgt im Menü: „Datei Einstellungen... 12 Kanal-EKG Untersuchungen“.
2	<p>Wählen Sie die Daten für den aktiven Patienten oder geben Sie neue Patientendaten ein.</p> 	F2	<p>Wenn Sie vor der Auswahl des Untersuchungsprogramms im Datenmanagement waren, ist der Patient bereits ausgewählt. Kontrollieren Sie die Kopfzeile.</p> <p>Wenn noch kein Patient ausgewählt wurde, wird der Dialog zur Patientenauswahl geöffnet. Suchen Sie in dem Feld Suche nach: auf Patientenname, Patientennummer oder Geburtsdatum. Hierzu tragen Sie den vollständigen Namen / Vornamen oder die ersten Zeichen ein. Tragen Sie die Patientennummer vollständig oder teilweise ein. Oder suchen Sie auf das vollständige Geburtsdatum.</p> <p>Bestätigen Sie die Suche mit dem Button . Wählen Sie den betreffenden Patienten aus der Liste aus..</p> 
3	<p>Legen Sie die Elektroden an.</p> <p>Im Elektrodenanlageschema blinken fehlerhaft angelegte Elektroden. Prüfen Sie in der EKG-Vorschau die Aufnahmequalität.</p>	<p>F3</p> <p>Shift+F3</p> <p>Klick</p>	<p> Muskel</p> <p>Schalten Sie das Filter nur ein, wenn sich keine ausreichende Aufnahmequalität erzielen lässt.</p> <p> Aufnahme-Info</p> <p>Tragen Sie einen Kommentar ein.</p> <p> BD  mmHg</p> <p>Sie können ein angeschlossenes Blutdruckmessgerät starten oder</p> <p> den Blutdruck manuell eingeben.</p>
4	<p>Starten Sie die Aufzeichnung. Der Button wird erst aktiv, wenn alle Elektroden fehlerfrei angelegt sind.</p> 	F2 oder 	

Strg+A 

Sie können mit fehlerhaften Elektroden starten.

Strg+R 

Das System startet einen Timer, der die Aufnahme nach 10 Sekunden stoppt. Sie können den Timer innerhalb der 10 Sekunden neu starten. Dann beginnt die Aufzeichnung von vorn.

Strg+S 

Sie können die Aufzeichnung von Hand starten und stoppen.

Strg+T 


5 Kontrollieren Sie die Aufzeichnung.

Strg+S
Strg+A 

Wenn erforderlich wiederholen Sie die Aufzeichnung im manuellen Mode oder im Automatikmode.



Klicken Sie auf den Button **EKG**, um das mehrkanalige EKG auszuwerten.

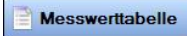

Klicken Sie auf den Button **Messwerttabelle**, um alle Messwerte im QRS - Bereich, im ST- Bereich und im P - Bereich für jeden Kanal anzuzeigen.




Klicken sie auf den Button **Mittelwertschlag**, um den berechneten Mittelwertschlag mit den gefundenen Wellenpunkten ein- bzw. mehrkanalig anzuzeigen.

Strg+B 

Sie können eine Bestätigung der Diagnose vornehmen. Ihr Benutzername wird dann zusammen mit Datum und Uhrzeit zur Diagnose bzw. zum Kommentar hinzugefügt.

6 Drucken Sie die Aufzeichnung.

Strg+F 


Sie können die Standardformate in der Vorschau auf dem Bildschirm ansehen.

Strg+P 


Drucken Sie die Aufzeichnung im Standardformat.

Mit einem rechten Mausklick auf einen der beiden Buttons öffnen Sie den Dialog zur Auswahl der Druckformate und zum Verändern der eingestellten Druckparameter.

7 Speichern Sie die Aufzeichnung.

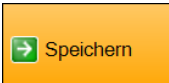








F2

Strg+X 


Brechen sie ab, wenn Sie die Aufzeichnung nicht speichern möchten.

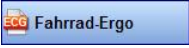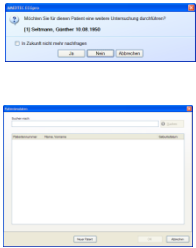Belastungs-EKG aufzeichnen


Verwenden Sie die Funktionen unter Optionen nur, wenn Sie von der Routine abweichen wollen.

	Routine	Tastatur	Optionen
1	<p>Wählen Sie das Belastungsprogramm aus.</p> 	Strg+7	Änderungen am Belastungsprogramm können Sie im Menü: „Datei Einstellungen... 12 Kanal-EKG Untersuchungen Fahrrad-Ergo“ (bzw. „Laufband-Ergo“) vornehmen.
2	<p>Wählen Sie die Daten für den aktiven Patienten.</p> 		<p>Wenn Sie vor der Auswahl der Belastungs-Untersuchung im Datenmanagement waren, oder für diesen Patient bereits eine Ruhe-Untersuchung durchgeführt haben, ist der Patient ausgewählt. Bestätigen Sie mit OK.</p> <p>Wenn noch kein Patient ausgewählt wurde, wird der Dialog zur Patientenauswahl geöffnet. Suchen Sie in dem Feld Suche nach: auf Patientenname, Patientennummer oder Geburtsdatum. Hierzu tragen Sie den vollständigen Namen / Vornamen oder die ersten Zeichen ein. Tragen Sie die Patientennummer vollständig oder teilweise ein. Oder suchen Sie auf das vollständige Geburtsdatum.</p> <p>Bestätigen Sie die Suche mit dem Button . Wählen Sie den betreffenden Patienten aus der Liste aus.</p>
3	<p>Kontrollieren Sie die Untersuchungsdaten.</p> 		 <p>Überprüfen Sie die Patientendaten Kontrollieren Sie die Angaben zur Anzeige von Grenzwerten. Wenn erforderlich, stellen Sie ein anderes Lastprofil ein oder ändern Sie die Startlast bzw. die Endlast des eingestellten Profils. Kontrollieren Sie die Einstellungen zum Drucken und zur Blutdruckmessung.</p>
4	<p>Legen Sie die Elektroden an.</p> <p>Im Elektrodenanlageschema blinken fehlerhaft angelegte Elektroden. Prüfen Sie in der EKG-Vorschau die Aufnahmequalität.</p>	F3	 <p>Schalten Sie den Filter nur ein, wenn sich keine ausreichende Aufnahmequalität erzielen lässt.</p>  <p>Tragen Sie einen Kommentar ein.</p>

5 Starten Sie die Aufzeichnung.
Der Button wird erst aktiv, wenn alle Elektroden fehlerfrei angelegt sind.

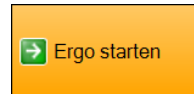


F2
oder

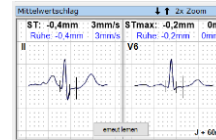

Warten Sie, bis ein Mittelwertschlag angezeigt wird.


Bei mangelhafter Qualität des Mittelwertschlags klicken Sie den Button **erneut lernen**.

F4

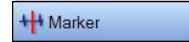


Sie können eine Marke setzen und diese beschriften.

F6

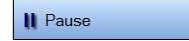

Halten Sie das mehrkanalige EKG an und blättern Sie zurück, um Ereignisse nochmals zu sehen und zu drucken.

F5

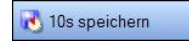

Speichern Sie die letzten 10 Sekunden als EKG Abschnitt.



Drucken Sie das fortlaufende EKG. Klicken Sie erneut, um das Drucken zu beenden.



Drucken Sie die letzten 10 Sekunden als EKG-Abschnitt.



Drucken Sie den Mittelwertschlag der letzten 10 Sekunden.

Strg+
F3




Sie können ein angeschlossenes Blutdruckmessgerät starten oder

Klick



den Blutdruck manuell eingeben.

6 Starten Sie das Lastprofil.

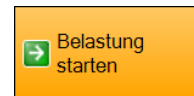


F2

Strg+
F3



Korrigieren Sie innerhalb von einer Minute die automatisch gemessenen Blutdruckwerte. Nach dieser Zeit wird ein Blutdruckwert als neuer Wert interpretiert.


Strg+↑
Strg+↓

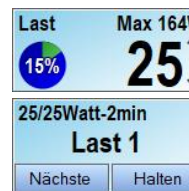


Wenn Sie die Last erhöhen wollen, klicken Sie auf ↑, um sie zu verringern auf ↓

Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt in die nächste Laststufe schalten oder die aktuelle Laststufe beliebig lang beibehalten.

7 Beenden Sie die Belastung vor Ablauf der eingestellten Belastungszeit.

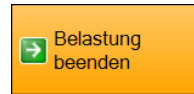

F2

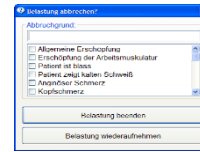


Geben Sie einen Grund für den Abbruch der Belastung ein. Alternativ können Sie die Belastung wieder aufnehmen.



Während der Erholphase kann der Dialog zur Eingabe von Abbruchgründen mit diesem Button geöffnet werden.

8 Beenden Sie die Ergometrie.

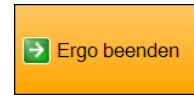

F2 oder



9 Kontrollieren Sie die Aufzeichnung.

F2




Blättern Sie durch das gesamte EKG. Verwenden Sie dazu die nebenstehenden Ansichten.

Strg+B




Tragen Sie in der Ansicht **Ergebnisse** Ihren Befund ein.

Strg+F

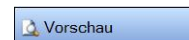


Sie können eine Bestätigung der Diagnose vornehmen. Ihr Benutzername wird dann zusammen mit Datum und Uhrzeit zur Diagnose bzw. zum Kommentar hinzugefügt. Sie können die Standardformate in der Vorschau auf dem Bildschirm ansehen.

Strg+P

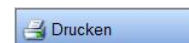

Drucken Sie die Aufzeichnung im Standardformat.

10 Speichern Sie die Aufzeichnung.

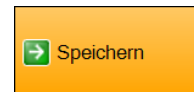

F2

Strg+X




Brechen sie ab, wenn Sie die Aufzeichnung nicht speichern möchten

Gespeicherte Aufnahmen öffnen


Gespeicherte Aufnahmen werden im Datenmanagement angezeigt.




☞ Um eine vorhandene Aufnahme zu öffnen, wechseln Sie in das Datenmanagement.

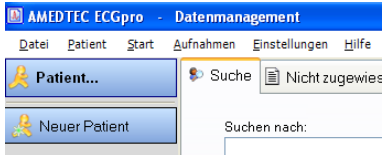

☞ Klicken Sie auf die Karteikarte **Suche**
 ☞ Suchen Sie den Patient aus, wie unter **Standard Ruhe-EKG aufzeichnen**, Abschnitt „Patient wählen...“ beschrieben.

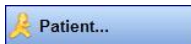


☞ Um einen Patienten auszuwählen, verwenden Sie den Dialog zum Suchen eines Patienten. Lesen Sie hierzu auch im Abschnitt Standard Ruhe-EKG aufzeichnen den Punkt „Patient wählen...“.

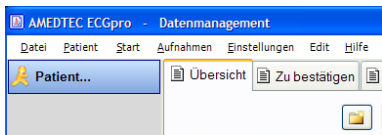


Bei Auslieferung ist die Karteikarte **Übersicht** deaktiviert. Um die Karteikarte zu benutzen, verschieben Sie den Begriff **Übersicht** im Menü „Datei | Einstellungen... | Datenbank | Datenmanagement“ in das Feld **Verwendete Karteikarten**. Verlassen Sie die Einstellungen und starten Sie AMEDTEC ECGpro neu.

☞ Klicken sie auf die Karteikarte **Übersicht**.

Auf dieser Karteikarte befindet sich links die Patientenliste und nach Auswahl eines Patienten werden rechts die zu dem Patienten gehörenden Aufnahmen in einer Liste angezeigt.

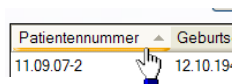



☞ Zum Sortieren der Patientenliste (Sortieren nach Patientennummer, Sortierung nach Patientenname) klicken Sie in die Kopfzeile.

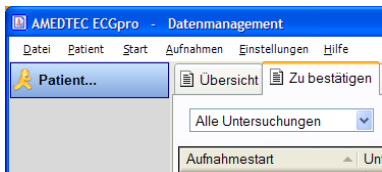

☞ Alternativ können Sie die Karteikarte **Zu bestätigen** verwenden.
 ☞ Öffnen Sie die Drop Down Box, um Filter auszuwählen. Damit kann Ihre Liste auf bestimmte Untersuchungen oder auf eine bestimmte Untersuchungszeit eingeschränkt (gefiltert) werden.

Die Karteikarte **Zu bestätigen** enthält nur unbestätigte Aufnahmen. Nach der Kontrolle und Bestätigung durch einen Arzt verschwinden die Einträge auf dieser Karteikarte.

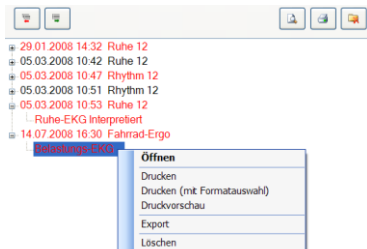

☞ Klicken Sie den Button , um die Aufnahmeliste aufzuklappen.
 ☞ Zum Öffnen einer Aufnahme klicken Sie diese doppelt oder klicken Sie die rechte Maustaste und anschließend den Eintrag **Öffnen** im Kontextmenü..


Die Aufnahmeliste auf der Karteikarte **Übersicht** und auf dem Patientenblatt (Karteikarte **Patient**) sind identisch.

Beachten Sie, dass validierte Aufnahmen nicht mehr verändert werden können. Funktionen, wie das Hinzufügen von Kommentar, das Korrigieren der Wellenpunkte oder das Korrigieren des Befundes sind nicht mehr möglich.

Typschild und Symbole

Das Typschild enthält die folgenden Angaben:

- Gerätebezeichnung
- ein „T“ hinter der Gerätebezeichnung kennzeichnet die Option: Gerät mit integriertem QRS-Trigger.
- Anschrift des Herstellers
- Seriennummer des Gerätes und Herstellungsjahr
- Symbole

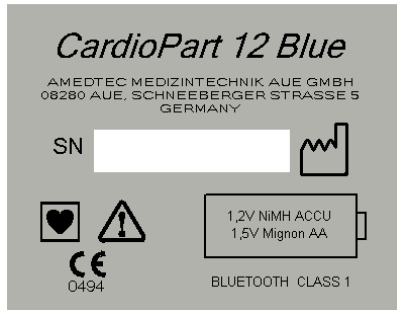

SN



Gerätenummer

Herstellungsjahr



CE - Zeichen

Anwendungsteil vom Typ CF
Das Anwendungsteil ist nur
defibrillationsgeschützt, wenn das mitgelieferte
Patientenkabel angeschlossen ist.



Achtung: Gebrauchsanweisung beachten!



Hinweis auf die Verwendung von Akkus bzw.
Batterien

BLUETOOTH
CLASS 1

Gerät entspricht der Bluetooth Klasse 1

Technische Daten

Dynamikbereich	+/- 316 mV DC
Abtastfrequenz	8000 Hz für jede der 10 Elektroden [10 x 8000 / Sekunde]
Auflösung	1 µV / LSB [0,01 mm]
IMRR	> 120 dB
Frequenzbereich	0 - 150 Hz
Schrittmachererkennung	Digitale Überwachung aller Elektroden
Eingangsimpedanz	> 50 MOhm
Eingangsschutz	gegen Defibrillatorimpulse ¹⁾ und Energien aus HF Chirurgiegeräten
Elektrodentest	Frequenzanalyse und Impedanzmessung
Patientenkabelanschluss	15 Pin D-Sub
Anwendungsteil	Typ CF Isolationsspannung 4000 Volt
PC-Schnittstelle	Bluetooth 2.0 Klasse 1 oder Klasse 2
Stromversorgung	2 Stück Mignon AA Batterien oder Akkus
QRS-Trigger	über ISM-Funkmodul ²⁾
Abmessungen	110 mm x 64 mm x 28 mm
Gewicht	160 Gramm (ohne Batterie)
Betriebsart	Dauerbetrieb
Umgebungsbedingungen	
im Betrieb	Temperatur: +5°C bis +40°C rel. Feuchte: >25%, <85% nicht kondensierend Luftdruck: 70kPa bis 106kPa
Transport und Lagerung	Temperatur: -25°C bis +70°C rel. Feuchte: <95% nicht kondensierend
Normen	DIN EN 60601-1; DIN EN 60601-1-2; DIN EN 60601-2-25;

1) Das Patienten-kabel oder die Saugelektrodenanlage müssen einen Schutzwiderstand von 10 kOhm in jeder Elektrodenleitung haben.

2) nur bei Version T

Angaben zu den verwendeten Funkkommunikationseinrichtungen

Typ	Frequenzen / Frequenzband	Kanal-bandbreite	Modulationsart	Abgestrahlte Leistung
Bluetooth	2,402 bis 2,483 GHz	1 MHz	GFSK, PI/4-DQPSK, 8-DPSK	+16 dBm
AMEDTEC QRS Trigger	433,9 MHz	64 kHz	2-FSK	+6 dBm

Optionales Zubehör

Beschreibung	Bestell-Nr.
10-adriges EKG-Kabel für Ruhe-EKG, 4mm/EU, 1,53m	011.0227
10-adriges EKG-Kabel für Ruhe-EKG, Klammer/EU, 1,53m	011.0228
10-adriges EKG-Kabel für Ruhe-EKG, Druckknopf/EU, 1,53m	011.0229
10-adriges EKG-Kabel für Ergometrie, Klammer/EU, 1,05m	011.0237
10-adriges EKG-Kabel für Ergometrie, Druckknopf/EU, 1,05m	011.0238
Ergometrie-Gurt für CardioPart 12 USB / Blue	016.0234
EKG-Adapter (zur Sauganlage)	011.0270
Extremitäten-Klammerelektroden Ag/AgCl	011.0280
Brustwand-Saugelektroden Ag/AgCl	011.0281
Bluetooth USB Dongle	100 107
Akku-Ladegerät inkl. 4 Akkus	001.427
Wandhalterung für CardioPart 12 Blue	016.0240
CardioPart 12 Blue – EHT (Einmal-Hygiene-Tasche)	016.0233
QRS-Trigger Empfangsmodul für CardioPart 12 Blue T	016.0270

Fehlersuche und -behebung

Fehler bei der EKG-Aufzeichnung

Elektroden mit unzureichendem Kontakt zur Haut werden als blinkendes Symbol dargestellt. Wenn kein EKG mehr aufgezeichnet werden kann, werden Ableitungen auf dem Bildschirm ausgeblendet.

- ☞ Kontrollieren Sie in diesen Fällen die Elektrodenapplikation und/oder die Patientenleitung.
- ☞ Beachten Sie auch die Hinweise zur **Beeinflussung durch andere Geräte**! Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. auf Seite 11.

Liefert eine Elektrode kein EKG-Signal mehr, kann das zum Ausblenden mehrerer Ableitungen führen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick für das 12-Kanal-EKG.

Fehlerhafte Elektrode	Ausgeblendete Ableitungen	Dargestellte Ableitungen
N	alle	Keine
R	I, II, aVR, aVL, aVF, C1 ...C6	III
L	I, III, aVR, aVL, aVF, C1 ...C6	II
F	II, III, aVR, aVL, aVF, C1 ...C6	I
C1	V1	I, II, III, V2, V3, V4, V5, V6
C2	V2	I, II, III, V1, V3, V4, V5, V6
C3	V3	I, II, III, V1, V2, V4, V5, V6
C4	V4	I, II, III, V1, V2, V3, V5, V6
C5	V5	I, II, III, V1, V2, V3, V4, V6
C6	V6	I, II, III, V1, V2, V3, V4, V5

Allgemeine Fehler


Wenn von AMEDTEC *ECGpro* Fehlermeldungen ausgegeben werden, die auf eine Fehlfunktion des **CardioPart 12 Blue** verweisen, sind diese zum größten Teil selbsterklärend. Das betrifft insbesondere:

- Meldungen zu Bluetooth-Verbindungsproblemen:
Kontrollieren sie in diesen Fällen, ob die Bluetooth-Verbindung durch externe Störungen oder Abschattung beeinträchtigt ist.
Siehe auch **Leitlinie und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Störfestigkeit des CardioPart 12 Blue** auf Seite 37.
- Meldungen zur Stromversorgung:
Kontrollieren Sie in diesen Fällen den Ladezustand der Batterien oder Akkus des **CardioPart 12 Blue**.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder direkt an unseren Service.

Leitlinie und Herstellererklärung zur elektromagnetischen Störfestigkeit des CardioPart 12 Blue

Das EKG-Gerät ist für den Betrieb in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Anwender des Gerätes sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung benutzt wird

Störaussendungsprüfung	Grenzwerte	Übereinstimmung	
HF-Störaussendung nach CISPR 11	Gruppe 1, Klasse B	Gruppe 1, Klasse B	Das Gerät erfüllt die relevanten Anforderungen in IEC 60601-1-2 bezüglich der HF-Aussendung.

Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601-1-2:2014 (Prüfpegel)	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach IEC 61000-4-2	±8 kV Kontaktentladung ±2, ±4, ±8, ±15 kV Luftentladung	±8 kV Kontaktentladung ±2, ±4, ±8, ±12 kV Luftentladung	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramikfliesen versehen sein. Wenn der Fußboden oder die Kleidung mit synthetischem Material versehen sind, sollte die Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Leitungsgeführte Störgrößen induziert durch HF-Felder nach IEC 61000-4-6	3 V _{eff} 150 kHz - 80 MHz	3 V _{eff} 150 kHz - 80 MHz	Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zum Gerät einschließlich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird. Empfohlener Schutzabstand: $d = 1,17 * \sqrt{P}$ für 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,33 * \sqrt{P}$ für 800 MHz bis 2,7 GHz d: Abstand in m P: Sendeleistung in W
Hochfrequente elektromagnetische Felder nach IEC 61000-4-3	6 V _{eff} 150 kHz - 80 MHz in ISM-Frequenzbändern 3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	6 V _{eff} 150 kHz - 80 MHz in ISM-Frequenzbändern 3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz	Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort geringer als der Übereinstimmungspegel sein. In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich. 
Hochfrequente drahtlose Kommunikationseinrichtungen	Prüffrequenzen von 385 MHz bis 5785 MHz nach Tabelle 9 (IEC 60601-1-2:2014)	Prüffrequenzen von 385 MHz bis 5785 MHz nach Tabelle 9 (IEC 60601-1-2:2014)	
Magnetfeld bei Versorgungsfrequenz (50 Hz) nach IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- oder Krankenhausumgebung vorzufinden sind, entsprechen.
Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.			
Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorption und Reflexion durch Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.			

Die Feldstärke stationärer Sender, wie z. B. Basisstationen von Funktelefonen und mobilen Landfunkgeräten, Amateurfunkstationen, AM- und FM-Rundfunk- und Fernsehsender kann theoretisch nicht genau vorherbestimmt werden. Um die elektromagnetische Umgebung hinsichtlich der Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standortes erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke an dem Standort, an dem das Gerät benutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte das Gerät beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z. B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des Gerätes.

Über den Frequenzbereich 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem CardioPart 12 Blue.

Das EKG-Gerät ist für den Betrieb in einer elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Kunde oder Anwender des Gerätes kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und dem Gerät - abhängig von der Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben - einhält.

Nennleistung des Senders W	Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz m		
	150 kHz bis 80 MHz $d = 1,17 * \sqrt{P}$	80 MHz bis 800 MHz $d = 1,17 * \sqrt{P}$	800 MHz bis 2,7 GHz $d = 2,33 * \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,24
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,70	11,70	23,30

Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in m unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zu der jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in W gemäß Angabe des Senderherstellers ist.

Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen wird durch Absorption und Reflexion durch Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

Garantie

1. AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH leistet für seine in der EU erworbenen Geräte eine Garantie von 12 Monaten ab Lieferung. Die Garantie gilt für alle Mängel, die auf Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
2. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die zurückzuführen sind auf normalen Verschleiß, mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Fahrlässigkeit, anormale Umgebungsbedingungen, nicht sachgemäße Behandlung, Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, fehlerhafte Installation, unbefugte Veränderungen oder Reparaturen durch nicht von AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH autorisierte Personen.
3. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Verbrauchsmaterial einschließlich Verschleißteile, je nach Gerätetyp, wie z. B. Elektroden, Akkus/Batterien, Batteriekontakte, Manschetten, Kabel sowie Schläuche.
4. Liegt ein berechtigter Garantieanspruch vor, kann AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH im eigenen Ermessen das betreffende Gerät reparieren oder gegen ein Gerät gleichen Typs oder gegen ein Gerät, das den gleichen Zweck erfüllt und dem gleichen oder einem neueren Stand der Technik entspricht, austauschen. Im Rahmen der Instandsetzung oder des Austausches zurückgeführte Geräte oder Baugruppen gehen in das Eigentum von AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH über.
5. AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH kann die Reparatur beim Kunden durchführen oder einen Vertragspartner mit der Reparatur oder dem Austausch beauftragen.
6. Erbringt AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH oder ein von ihr Beauftragter eine Garantieleistung, verlängert sich dadurch der Garantiezeitraum nicht.
7. Als Garantienachweis gilt die Rechnung oder ein anderer Beleg, woraus das Datum des Erwerbs ersichtlich ist. Jede Art von Garantieansprüchen ist innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach Kenntnisaufnahme gegenüber dem Fachhändler oder direkt gegenüber AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH geltend zu machen.
8. AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH haftet nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Schadenersatzanspruch ist auf den nach Art des Gerätes vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
Die Haftungsbegrenzung gilt nicht für Fälle, in denen zwingend gehaftet wird. Das sind Ansprüche, die nach dem Produkthaftungsgesetz geltend gemacht werden oder bei Schäden an Körper und Gesundheit oder Verlust des Lebens.
9. Weiterführende Ansprüche aus dieser Garantieerklärung sind ausgeschlossen. Insbesondere haftet AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH nicht für Betriebsunterbrechung oder entgangenen Gewinn.
10. Handelt es sich bei einem Schaden nicht um einen Garantiefall, obwohl er als solcher geltend gemacht wurde, liegt es im Ermessen von AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH, die für die Leistung entstandenen Kosten teilweise oder ganz in Rechnung zu stellen.

(000-0325-2_01 M0669)

Entsorgung

In Deutschland unterliegt die Entsorgung des EKG-Gerätes dem „Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG“.

Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Bestimmungen, zu deren Einhaltung Sie mit Erwerb des Gerätes verpflichtet sind.



Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll und nicht bei Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte.

Informieren Sie Ihren Fachhändler. Er wird das Gerät zurücknehmen.

Sie können das Gerät auch direkt an unsere untenstehende Adresse senden.

In anderen Ländern können andere Regelungen gelten. Bitte beachten Sie deshalb die für Sie zutreffenden Bestimmungen.

Copyright © 2020

Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten und jederzeit möglich.

AMEDTEC Medizintechnik Aue GmbH
Schneeberger Straße 5
08280 Aue
Germany

Tel.: +49 (0) 3771 59827 0
Fax: +49 (0) 3771 59827 90
E-Mail: info@amedtec.de
Internet: www.amedtec.de