



NEU



Hygienemanagement

EINWEGPUMPE WANDSPENDER PLUS

HYGIENISCH SICHER –
EINFACH IN DER ANWENDUNG

EINWEGPUMPE WANDSPENDER PLUS

HYGIENISCH SICHER – EINFACH IN DER ANWENDUNG


Die neue B. Braun Einwegpumpe gewährleistet nicht nur einen hohen Hygienestandard, sondern spart Ihnen zugleich kostbare Zeit durch die überflüssige Pumpenaufbereitung.

PRODUKTMERKMALE


- Kunststoffpumpe zur einmaligen Verwendung im Wandspender plus
- Einfacher Pumpenaustausch bei jedem Flaschenwechsel
- Zeitaufwendige und kostenintensive Aufbereitung der Kunststoff- oder Edelstahlpumpe entfällt
- Geeignet für alkoholische Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen
- Hygienisch einzeln verpackt zum sicheren Einsetzen der Pumpe
- Dosiermenge: 1,3 ml pro Hub (nicht veränderbar)
- Nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar, zur einmaligen Verwendung




BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM EINSETZEN DER PUMPE

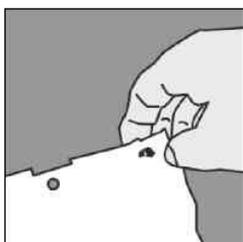


An der gekennzeichneten Stelle auf der Verpackung ziehen

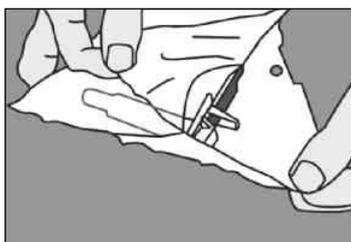

Öffnen Sie die Verpackung an der Seite des Pumpenkopfes

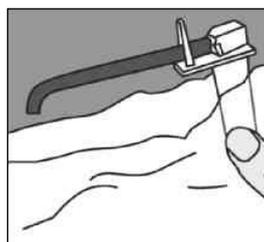

Nehmen Sie die Einwegpumpe mit der Verpackung in die Hand

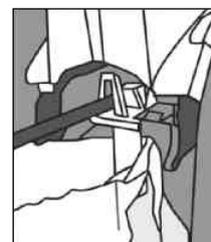

Setzen Sie die Einwegpumpe mit Verpackung in der Hand in den Wandspender plus ein

EINWEGPUMPE WANDSPENDER PLUS

LIEFERFORM	ANZAHL	ART.-NR.	PZN
für 500 ml-Flaschen	1 Stück	4400387	13335305
für 1.000 ml-Flaschen	1 Stück	4400390	13335334

B. Braun Melsungen AG | 34209 Melsungen | Deutschland
Tel. (0 56 61) 71-33 99 | Fax (0 56 61) 71-35 50 | www.bbraun.de/hygiene