

B. Braun Wipes ECO

Trockene Tuchrolle mit 120 Tüchern für den nachfüllbaren Vliestuchspender



Hygiene

B. Braun Wipes ECO

Trockene Tuchrolle mit 120 Tüchern für den nachfüllbaren Vliestuchspender

Tuchrolle mit 120 trockenen Tüchern

Synthetisches Vliesmaterial (100% PET)

Tuchgröße 19 x 36 cm

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel: Hexaquart® forte, Hexaquart® plus/lemon fresh, Melsept® SF, Meliseptol® rapid, Meliseptol® Foam pure

4 Wochen Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung mit den B. Braun Wipes ECO

Im bekannten Spendersystem (Eimer mit blauem Deckel) einsetzbar



Hinweise zur Anwendung und Dosierung

1. Handschuhe tragen; Vliestuchrolle einsetzen
2. Circa 2,5 Liter gebrauchsfertige Lösung einfüllen und von der Mitte nach außen über die Vliesrolle gießen; 10 Min. warten, bis die Vliesrolle vollständig durchtränkt ist
3. Vliestuch durch den Deckel führen; das erste Tuch werfen; Deckel immer unmittelbar nach Tuchentnahme wieder verschließen; Aufkleber beschriften und aufkleben

Den Tuchrollen liegt ein Aufkleber zum Beschriften des Spenders bei:

B. Braun Wipes ECO
Салфетки флисовые B. Braun ECO

Enthält gebrauchsfertige Reinigungs- / Desinfektionslösung

Produktname: Product name: Nom du Produit: Название дез. средства:	LOT: REF: PZN: 10329126
Konzentration: Concentration: Концентрация дез. средства:	Einwirkzeit: Action time: Temps d'action: Время действия:
angesetzt am: Filled on: Date d. rempliss. Дата розлива:	haltbar bis: Use by: de préf. avant fin: Использовать до:
Name: Name: Nom: Ф.И.О.:	

B | BRAUN Nachfüllbarer Desinfektionstuchspender / Refillable Fleece Wipe Dispenser / Distributeur rechargeable de lingettes en non-tissé

2014-02-03 - 890444

Geprüfte B. Braun Desinfektionsmittel

Die in der Tabelle gelisteten B. Braun Produkte sind mit den B. Braun Wipes ECO-Vliestüchern geprüft. Die B. Braun Wipes ECO-Vliestücher lagern den Desinfektionswirkstoff nicht an, sondern geben ihn an die zu desinfizierende Fläche ab.

Produkt	Lieferform	Art.-Nr.	PZN
B. Braun Wipes ECO	Spendersystem mit blauem Deckel (ohne Vliesrolle)	19162	06067637
	Vliesrolle mit 120 Tüchern	19726	10329126



B. Braun Produkt	Mindestkonz.	EZ	Haltbarkeit der angesetzten Gebrauchslösung
Hexaquart® forte	0,5%	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus	0,5%	60 Min.	4 Wochen
Hexaquart® plus lemon fresh	0,5%	60 Min.	4 Wochen
Melsept® SF	1,0%	60 Min.	4 Wochen
Meliseptol® rapid	konz.	1 Min.	4 Wochen
Meliseptol® Foam pure	konz.	1 Min.	4 Wochen