

SAM
MEDICAL

SAM[®] XT

Extremity Tourniquet
EXTREMITÄTEN - TOURNIQUET

**KLICKEN.
DREHEN.
SICHERN.**



HÄLT SICHER

Entwickelt zur schnellen Applikation, verfügt das SAM XT über ein innovatives Design, welches weniger Drehungen benötigt und ermöglicht einfacheres, schnelles Training und eine instinktive Verwendung. Erfüllt den MIL-STD 810G für Haltbarkeit.



VERWENDETE TECHNOLOGIE

TRUFORCE™ VERSCHLUSS

Schläffe Gurte sind der Hauptgrund für fehlerhaft angelegte Tourniquets. Die TRUFORCE™ Verschluss-technologie schließt automatisch und eliminiert die Überlänge des Gurtes fast komplett durch die Integration eines innovativen Kraftkontrollsystems, welches die Sperrriegel einrasten lässt.



ENTWICKELT UM LEBEN ZU RETTEN

1 ZEITSTREIFEN

Ein wetterfester Klettverschlussstreifen der auch unter völliger Nässe funktioniert, bietet maximale Sicherheit unter den widrigsten Wetterbedingungen. Das Außenmaterial ist sichtbar bei der Verwendung von Nachtsichtgeräten.

2 C - HAKEN FÜR KNEBEL

Sichert den Knebel mit einem speziellem Winkeldesgin, welches das Einrasten des Knebels einfacher und effizienter macht.

3 TRUFLEX™ PLATTE

Die widerstandsfähige Nylonkonstruktion verteilt die Kraft als gezielten Druck, wodurch maximale Stärke und Flexibilität erzielt wird, und sie kann sich um kleinere Extremitäten biegen, ohne zu brechen.

4 TRUFORCE™ VERSCHLUSS

Die innovative automatische Verschluss-technologie lässt die Sperrriegel einrasten und verhindert so die Überlänge, die man in anderen Tourniquets vorfindet.

5 KNEBEL AUS METAL


Maschinell hergestellt aus festem, strangengepressten, leichtgewichtigen und eloxiertem 6061-T6 - Aluminium, bietet der Knebel dauerhafte Zuverlässigkeit im Vergleich zu Plastikknäbeln.

6 PRÄZISIONSGURT

Klettverschluss abhängige Tourniquets können versagen, wenn diese nass oder schmutzig werden. Der für alle Wetterbedingungen geeignete Präzisionsgurt besteht aus einlagigem Nylongewebe. Der Gurt hat in Abständen angebrachte Löcher, die sich mit dem TRUFORCE™ Verschluss verriegeln lassen und so eine beständige, effiziente primäre Sicherung gewährleisten. Der Klettverschluss sichert den Rest des Gurtes und fügt Stabilität und Sicherung hinzu.

PRÄZISIONS-TAB

Das spezielle Design ermöglicht eine schnellere, einfachere Tourniquet Applikation. Das Material ist sichtbar bei der Verwendung von Nachtsichtgeräten.

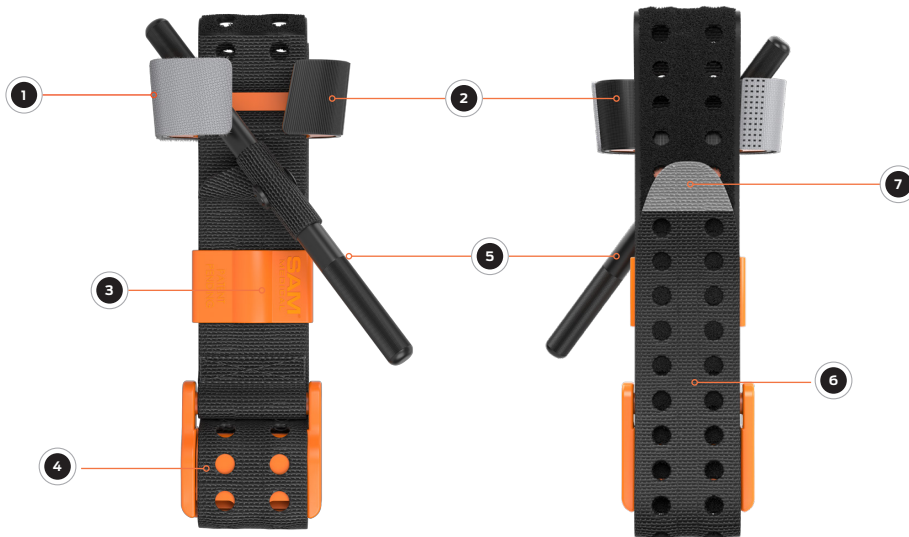

MODELLE



PRODUKTDATEN

VERPACKUNGSGRÖSSE U. GEWICHT*

Länge: 6.3 cm (2.5 in)
Breite: 3.8 cm (1.5 in)
Höhe: 18.4 cm (7.25 in)
Gewicht: 108 g (3.8 oz)

BESONDERHEITEN

TRUFORCE™ - Verschluss-technologie schließt automatisch, um Gurtlöcher innerhalb ihres Umfangsbereichs zu halten:
13.9 cm - 88.9 cm (5.5 in - 35 in)

VERFÜGBARE MODELLE**

Taktisch Schwarz (XT600-BK-EN) / NSN#: 6515-01-670-2240
HI-VIZ Orange (XT600-OR-EN)
HI-VIZ Blau (XT600-BL-EN)

GLOBALER VERTRIEB

USA Gebührenfrei: 800.818.4726
USA Örtlich: 503.639.5474
USA Fax: 503.639.5425
sammedical.com

<p>Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 BH, Den Haag, Niederlande</p>			XT600-BK-EN
			XT600-OR-EN XT600-BL-EN

* Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Fertigungsprozess.
** Patent angemeldet.
SAM® ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke.
©2019 SAM Medical Products Alle Rechte vorbehalten.